



GEBRUIKERSHANDLEIDING



Including Models: Q6 Edge HD™, Q6 Ultra™, and Q6 Edge Z™

QUANTUM®

PROVIDING GREATER INDEPENDENCE

WAARSCHUWING!

Een Quantum Rehab Aanbieder of een gekwalificeerde technicus moet verrichten de eerste installatie van dit elektrische rolstoel en moet alle procedures uit te voeren die in deze handleiding.

De symbolen hieronder zijn gebruikt in deze handleiding en op de elektrische rolstoel op de waarschuwingen en belangrijke informatie te identificeren. Het is zeer belangrijk voor u om ze te lezen en volledig begrip.

WAARSCHUWING!

Geeft een mogelijke gevaarlijke conditie/situatie. Het niet opvolgen van aangewezen procedures kunnen hierdoor persoonlijke verwondingen, beschadiging van onderdelen, of slechte werking. Op het product wordt deze afbeelding weergegeven als een zwart symbool op een gele driehoek met een zwarte rand.

VERPLICHT!

Deze acties moeten worden uitgevoerd volgens de specificaties. Indien verplichte handelingen uit te voeren kan leiden tot persoonlijke letsel en/of materiële schade. Op het product wordt deze afbeelding weergegeven als een wit symbool op een blauwe stip met een witte rand.

VERBODEN!

Deze handelingen zijn verboden. Deze acties mogen niet worden uitgevoerd op elk moment of in welke omstandigheden. Het uitvoeren van een verboden handeling kan persoonlijke letsel en/of materiële schade. Op het product wordt deze afbeelding weergegeven als een zwart symbool met een rode cirkel en rode streep.

Beoogd gebruik

Het beoogde gebruik van dit apparaat van Pride Mobility Products is om mobiliteitshulp te bieden aan personen met een mobiliteitsbeperking die in staat zijn om een gemotoriseerde elektrische rolstoel te bedienen in een binnen-/buitenomgeving.

Met betrekking tot medische hulpmiddelen voor gebruik op advies van een behandelaar.

Onze mobiliteitsproducten en hun onderdelen zijn zowel in de detailhandel ("over-the-counter") als op recept verkrijgbaar. Indien voorgeschreven is de volgende verklaring van toepassing.

WAARSCHUWING!

VOORZICHTIGHEID! Volgens de wetgeving mag dit middel alleen worden verkocht door of op advies van een arts of een ander daarvoor bevoegd persoon, welke bevoegd is volgens de wet van het land waar het mobiliteitsproduct wordt gebruikt.

LET OP: Deze handleiding is samengesteld uit de laatste specificaties en product informatie op het moment van publicatie. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen als die nodig worden. Eventuele wijzigingen aan onze producten kunnen geringe verschillen tussen de illustraties en de verklaringen in deze handleiding en het product dat u hebt aangeschaft. De laatste/huidige versie van deze handleiding is beschikbaar op onze website.

LET OP: Dit product voldoet aan richtlijnen en vereisten van WEEE, RoHS en REACH.

LET OP: Dit product voldoet aan IPX4 classificatie (IEC 60529).

LET OP: Dit product voldoet en de bijbehorende onderdelen zijn niet vervaardigd met natuurlijk rubberlatex. Raadpleeg de fabrikant met betrekking tot eventuele onderdelen en/of accessoires.

Snelle Referentie Informatie

Rehabilitatie Aanbieder: _____

Adres: _____

Telefoonnummer: _____

Date van aankoop: _____




INHOUD

Inleiding.....	5
Veiligheid.....	6
Uw Elektrische Rolstoel.....	7
Montage.....	11
Comfortaanpassingen.....	15
Batterijen en Opladen	19
Verzorging en Onderhoud	22

ADVIES MET BETREKKING TOT BEPAALDE ONDERDELEN DIE DOOR FABRIKANTEN VAN DERDEN IN AFGEWERKTE ELEKTRISCHE STOELN WORDEN AANGEBRACHT: Wanneer elektrische onderstellen, zitsystemen of andere componenten van Quantum Rehab worden ingebouwd in een voltooide elektrische rolstoel die door een derde partij is vervaardigd of gemonteerd, is die derde partij verantwoordelijk om de veiligheid, functionaliteit en wettelijke conformiteit van de voltooide elektrische rolstoel te verzekeren. Quantum Rehab geeft geen uitspraken over de veiligheid, functionaliteit of wettelijke conformiteit van de voltooide elektrische rolstoel of de onderdelen die door een derde partij zijn vervaardigd. Hoewel Quantum Rehab er alles aan doet om ervoor te zorgen dat onze componenten op verantwoorde wijze worden gedistribueerd, worden fabrikanten, distributeurs en consumenten eraan herinnerd dat voltooide elektrische rolstoelen moeten voldoen aan een verscheidenheid aan normen en vereisten voor veiligheid en eisen van de overheid.

Als het nodig is om een elektrische rolstoel fysiek aan te passen, inclusief het toevoegen van componenten van derden, om tegemoet te komen aan de medische behoeften van de gebruiker van de elektrische rolstoel, een risicobeoordeling in overeenstemming met ISO 14971, zoals uiteengezet in ISO 7176, moet worden uitgevoerd.

Veranderingen aan elektrische rolstoelen die de conformiteit en risico-evaluatie waarschijnlijk zullen beïnvloeden, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het verplaatsen van de bevestigingspuntbeugels; het verlagen van de hoogte van de rugleuning; de zitlengte verkorten; het toevoegen van secundaire houdingsondersteuning die niet stevig aan de elektrische rolstoel zijn bevestigd; het toevoegen van componenten die scherpe randen hebben (d.w.z. randen met een straal van minder dan 2 mm [0,08 inch]); of enige verandering die de structurele integriteit van het frame van de elektrische rolstoel in gevaar brengt.

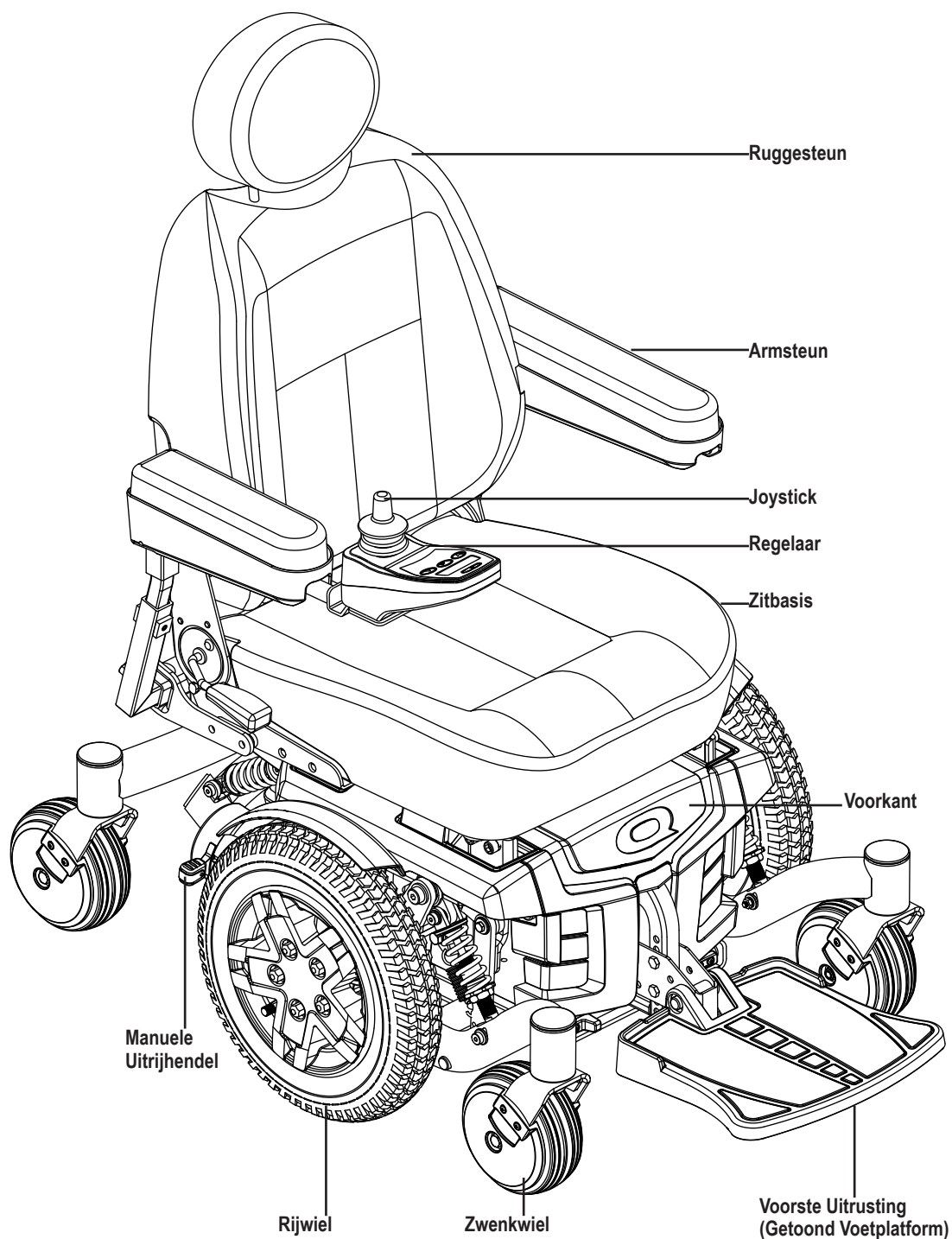

Veiligheid

WELKOM bij Quantum Rehab. De elektrische rolstoel die u gekocht heeft, combineert componenten, met de allernieuwste snuffjes, met veiligheid, comfort en styling. We zijn er zeker van dat deze ontwerpkenmerken u zullen voorzien van het gemak dat u verwacht tijdens uw dagelijkse activiteiten. Eens u begrijpt hoe u op een veilige manier uw elektrische rolstoel kan bedienen en onderhouden, zal het u jaren van probleemloze bediening en dienstverlening bezorgen.

Lees en volg alle instructies, waarschuwingen, en berichten in deze handleiding vooraleer te proberen uw elektrische rolstoel voor de eerste keer te bedienen. U moet ook alle instructies, waarschuwingen en berichten lezen die u kan vinden in alle bijkomende instructieboekjes voor de regelaar, voorste uitrusting en /of zitsysteem dat uw elektrische rolstoel vergezeld vóór de initiële bediening. Uw **veiligheid** hangt zowel van u af als van uw leverancier, zaakwaarnemer of gezondheidsprofessional, door gezond verstand te gebruiken.

Indien er bepaalde informatie in deze handleiding staat die u niet begrijpt, of indien u bijkomende informatie vereist voor instelling of bediening, gelieve dan uw Quantum Rehab leverancier te contacteren. **Het niet volgen van de instructies in deze handleiding en die gelocaliseerd op uw elektrische rolstoel kunnen leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan de elektrische rolstoel, inclusief het ongeldig worden van de garantie.**

Overeenkomst van de koper

Door het aanvaarden van de levering van dit product, belooft u dit product niet te veranderen, wijzigen of aanpassen of bepaalde beveiligingen, of andere veiligheidskenmerken van dit product onbruikbaar of onveilig te maken; falen, weigeren of nalaten af en toe mogelijke retrofit kits, geleverd door Pride om het veilige gebruik van dit product te verhogen of behouden, te installeren.

Transport en levering

Verzekert u ervan, alvorens uw elektrische rolstoel te gebruiken, dat de levering volledig is daar sommige componenten afzonderlijk verpakt kunnen zijn. Indien u geen volledige levering ontvangt, gelieve dan uw Quantum Rehab Leverancier dadelijk te contacteren. Wanneer er schade berokkend werd tijdens het transport, hetzij aan de verpakking hetzij aan de inhoud, gelieve dan de verantwoordelijke van de transportfirma te contacteren.

LET OP: Indien u ooit uw kopie van deze handleiding verliest of uit het oog verliest, contacteer ons dan en we zullen u graag dadelijk een nieuwe bezorgen.



Veiligheidssymbolen product

De symbolen hieronder worden op de elektrische rolstoel gebruikt om waarschuwingen, verplichte acties en verboden acties te identificeren. Het is erg belangrijk voor u dat u ze volledig leest en begrijpt.

NOTE: Er zijn meer waarschuwingen, geïdentificeerd en uitgelegd in de Veiligheidsgids voor de Verbruiker, inclusief bij uw elektrische rolstoel. Gelieve u vertrouwd te maken met al de waarschuwingen en veiligheidsinformatie, te vinden in de Veiligheidsgids voor Verbruikers en check deze bron vaak.



Lees en volg de informatie in de handleiding van de eigenaar.

Geblokkeerd en in drivemodus

Plaats de eenheid op een vlakke ondergrond en sta aan één kant bij het veranderen van drivemodus naar uitrijmodus of uitrijmodus naar drivemodus.

Niet geblokkeerd en in uitrijmodus

OR

Geeft bevestigings-punten van de elektrische rolstoel MET GEBRUIKER aan.

OR

Geeft onbezette bevestigingspunten van de elektrische rolstoel aan



Duidt aan dat de elektrische rolstoel, met een gelijkaardig gelabeld zitsysteem, conform is aan ANSI/RESNA WV/Vol. 4, Sectie 19 voor transport van een bezette elektrische rolstoel in een motorvoertuig.



Duidt aan dat een elektrische rolstoel met een gelijkaardige label niet bepaald is voor bezet vervoer.

Klasse II Materiaal

OR

Gefabriceerd in

Informatielabel elektrische stoel

Algemene richtlijnen



VERPLICHT!

Bedien uw elektrische rolstoel niet voor de eerste keer zonder deze eigenaarshandleiding volledig te lezen en te verstaan.

Uw elektrische rolstoel is een uitmuntend levensverhogend toestel, ontworpen om de mobiliteit te verhogen. Pride levert een uitgebreid gamma producten om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de individuele noden van de gebruiker van de elektrische rolstoel. Denk eraan dat de uiteindelijke selectie en aankoop met betrekking tot het type van te gebruiken elektrische rolstoel de verantwoordelijkheid is van de gebruiker van de elektrische rolstoel, die in staat is dergelijke beslissing te nemen, en zijn/haar gezondheidsprofessional (d.i. dokter, fysieke therapeut, enz.).

De Inhoud van deze handleiding is gebaseerd op de verwachting dat een mobiliteitstoestel-expert de elektrische stoel correct aangepast heeft aan de gebruiker en de voorschrijvende gezondheidsprofessional en/of Quantum Rehab Leverancier bijgestaan heeft in het instructieproces vóór het gebruik van het product.

Er zijn bepaalde situaties, inclusief bepaalde medische omstandigheden, waar de elektrische rolstoel gebruiker het bedienen van de elektrische rolstoel zal moeten oefenen in aanwezigheid van een getrainde begeleider. Een getrainde begeleider kan gedefinieerd worden al seen familielid of zorgprofessional, specifiek getraind in het assisteren van een elektrische rolstoelgebruiker bij tal van dagelijks leven activiteiten.

Naarmate u begint uw elektrische rolstoel te gebruiken tijdens dagelijks leven activiteiten, zal u wellicht situaties tegenkomen waarin u wat oefening gebruiken kan. Neem eenvoudigweg de tijd en u zal spoedig volledige en betrouwbare controle hebben bij het manoeuvreren door doorgangen, in en uit liften, op en neer hellingen, en over gematigd terrein.

Onderaan vindt u wat voorzorgsmaatregelen, tips en andere veiligheidsoverwegingen die u zullen helpen gewoon te worden aan het veilige bedienen van uw elektrische rolstoel.

Pre-rijd veiligheidscontrole

Word gewoon aan het gevoel van uw elektrische rolstoel en diens mogelijkheden. Pride raadt aan een veiligheidscontrole uit te voeren vóór elk gebruik om er zeker van te zijn dat uw elektrische rolstoel vlotjes en veilig werkt.

Voer de volgende inspecties uit vooraleer uw elektrische rolstoel te gebruiken:

- Controleer de correcte bandenspanning. Behoud maar overschrijd niet de psi/bar/kPa luchtdrukbe paling, aangeduid op elke band, indien uitgerust met pneumatische banden.
- Controleer alle elektrische verbindingen. Verzekert u ervan dat ze strak zijn en niet verweerd.
- Controleer alle regelaarverbindingen met de vermogensbasis. Verzekert u ervan dat ze correct vastgemaakt zijn.
- Controleer de remmen. Zie "Verzorging en Onderhoud."
- Controleer de batterijlading. Zie "Batterijen en Opladen."
- Zorg ervoor dat de handmatige vrijloophendels in rijmodus staan, voordat u op de elektrische rolstoel plaats neemt.

LET OP: Indien u een probleem opmerkt, contacteer dan uw Quantum Rehab leverancier voor assistentie.

De Q6 Serie Elektrische Rolstoel

Uw elektrische rolstoel heeft twee hoofdmontages: de zitmontage en de vermogensbasis montage. Het is kenmerkend dat de zitmontage inclusief armsteunen, ruggesteun en zitbasis is. De vermogensbasis montage is inclusief twee motor/remmontages, twee rijwielen, vier zwenkwielen, twee batterijen en bedradingsomkasting. **Zie Q6 Edge Series (pagina 4) en figuur 1.**

Elektrische componenten

De elektrische componenten bevatten de regelaarmontage, de batterijen en de motoren. De batterijen, motoren en regelaar vermogensmodule (indien ermee uitgerust) zijn te vinden op de vermogensbasis montage. De regelaar is te vinden op de zitmontage. Verbinding tussen de regelaar en de motoren, batterijen en de batterijlader wordt geleverd door één of meer bedrade harnessen. **Zie figuur 1.**


Regelaar harnas verbinder: De regelaar harnas verbinder is waar de regelaar ingeplugd wordt in de vermogensbasis. Elke regelaar gebruikt een verschillend type harnas. Ongeacht welk type regelaar gebruikt wordt, moet het harnas vastgemaakt worden aan de zitmontage en is het niet toegestaan op de vloer te slepen.

Motorverbinders: Dit is waar de regelaar verbinding maakt met de motoren.

Batterijverbinder: Dit is waar de regelaar verbinding maakt met de batterijen.

Regelaar vermogensmodule: Dit staat de regelaar toe te communiceren met de batterijen en de motoren.

Hoofd stroomonderbreker (gelocaliseerd op het achterst hoofdkader): De hoofd stroomonderbreker is een veiligheidskenmerk, ingebouwd in uw elektrische rolstoel. Wanneer de batterijen en de motoren hevig onder druk staan (bv door buitensporige ladingen) hield de hoofd stroomonderbreker over om schade aan de motoren en de elektronica te verhinderen. Wanneer de stroom overhelt, staat dan uw elektrische rolstoel toe gedurende ongeveer één minuut te "rusten". Duw nadien de stroomonderbrekertoets in, schakel de regelaar in en ga verder met normale bediening. Wanneer de stroom onderbreker regelmatig verder overhelt, contacteer dan uw Quantum Rehab Leverancier.

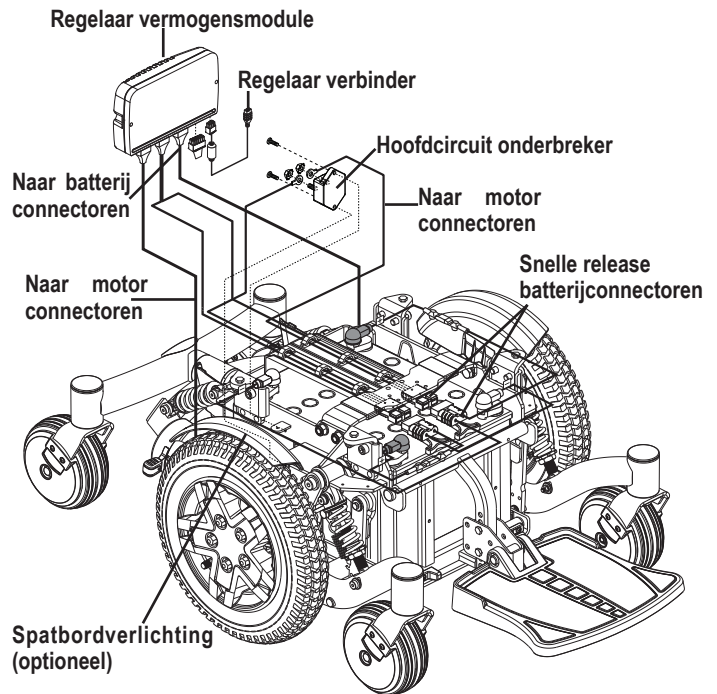

Figuur 1. Elektrische componenten

Manuele uitrijhendels

Voor uw gemak is uw elektrische rolstoel uitgerust met een manuele uitrijhendel, gemonteerd op elke motor. De hendels staan u toe de rijmotoren uit te schakelen en de rolstoel manueel te manoevreren.



WAARSCHUWING!

Gebruik de elektrische rolstoel niet terwijl de rijmotoren uitgeschakeld zijn! Schakel de rijmotoren niet uit wanneer de elektrische rolstoel op een helling staat, daar de eenheid zelf zou kunnen beginnen rollen! Schakel de uitrijmodus enkel in wanneer u zich op een effen ondergrond bevindt.



WAARSCHUWING!

Het is belangrijk om te herinneren dat, wanneer uw elektrische rolstoel in uitrijmodus, wordt het remsysteem uitgeschakeld.

Om de manuele uitrijhendels te bedienen:

1. Druk beide manuele uitrijhendels voor uitrijmodus naar omlaag (rijmotor uitgeschakeld). Zie figuur 2.
2. Trek beide manuele uitrijhendels omhoog voor rijmodus (rijmotor ingeschakeld). Zie figuur 2.



VERPLICHT!

U moet het vermogen uitschakelen vooraleer de rijmotoren uit te schakelen, anders kan u een foutcode ontvangen op de regelaar. Om deze code te verwijderen, zet dan de regelaar uit en plaats de elektrische rolstoel in rijmodus. Schakel dan de regelaar terug in. De foutboodschap moet verwijderd worden. Indien dit niet gebeurt, contacteer dan uw Quantum Rehab Leverancier.

LET OP: De elektrische rolstoel zal beduidend makkelijker zijn om vooruit te duwen met het vermogen uitgeschakeld.



WAARSCHUWING!

Vermijd het toepassen van buitensporige kracht op de manuele uitrijhendels.

Gebruik uw voet niet om de manuele uitrijhendels te bedienen. Sta niet op de manuele uitrijhendels. Het toepassen van buitensporige kracht op de manuele uitrijhendels kan resulteren in schade aan de uitrijhendels, motoren en remmen.

Gebruik de uitrijhendels niet als vastgrijppunten om dit product vast te maken.

iLevel®-functie (optioneel)

Uw elektrische rolstoel kan uitgerust zijn met de iLevel-functie die gebruikt zal worden in combinatie met uw zitsysteem. De iLevel-functie is gemonteerd op een Quantum-kraachtbasis voor maximale stabiliteit wanneer het zitsysteem verhoogd is. Zie figuur 3.


Uitrijmodus



Rijmodus



Figuur 2. Manuele uitrijhendel operatie

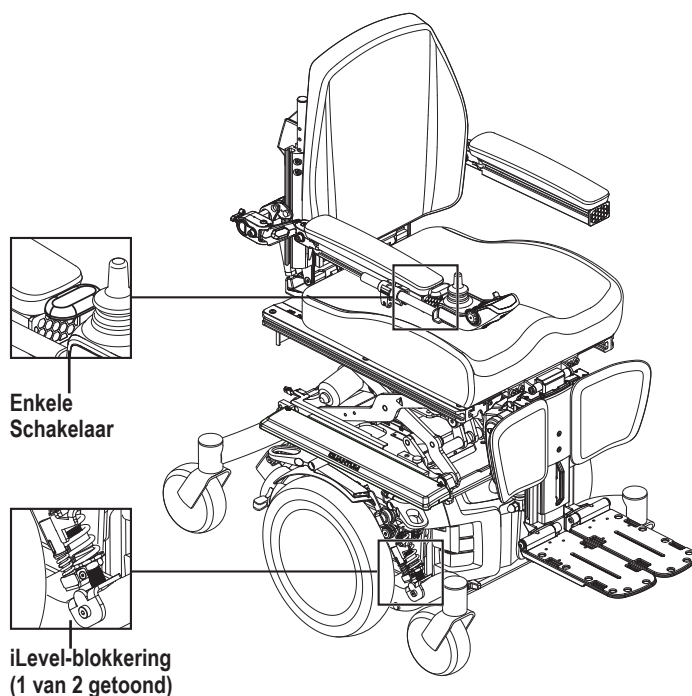

Figuur 3. De iLevel®-functie

LET OP: Raadpleeg de informatie in de gebruikshandleiding in uw eigenaarpakket, als de elektrische rolstoel is uitgerust met een elektrisch positioneringssysteem van TRU-Balance® 3.

VERPLICHT!

Lees het onderstaande zorgvuldig door, voordat u de iLevel-functie in gebruik neemt. Deze richtlijnen zijn bedoeld om u te helpen bij de veilige bediening van de iLevel-functie.

- Schakel de voeding uit voordat u gaat zitten in naaruw elektrische rolstoel.
- Zorg dat u altijd hulp krijgt als u gaat zitten in of wordt overgeplaatst uw elektrische rolstoel.
- Volg alle procedures en neem de waarschuwingen in acht, zoals uitgelegd in de gebruikshandleiding, de aanvullende handleidingen en de veiligheidshandleiding voor de consument.

WAARSCHUWING!

Het zwaartepunt van uw elektrische rolstoel is in de fabriek ingesteld op een positie die voldoet aan de eisen van de demografische meerderheid van gebruikers. Uw Quantum Rehab-leverancier heeft uw elektrische rolstoel beoordeeld en eventueel noodzakelijke aanpassingen aangebracht voor uw specifieke vereisten. Breng geen wijzigingen aan in de zittingconfiguratie zonder eerst contact op te nemen met Quantum Rehab of uw Quantum Rehab-leverancier.

Sommige onderdelen van elektrische rolstoelen zijn zwaar. Mogelijk hebt u hulp nodig om ze op te tillen of te dragen. Raadpleeg de specificatietabel voor het gewicht van specifieke onderdelen, voordat u de elektrische rolstoel demonteert.

Haal de inzittende uit de elektrische rolstoel voordat eventuele aanpassingen worden uitgevoerd.

LET OP: De iLevel-functie wordt automatisch ingeschakeld als de elektrisch verhoogde zitting wordt geactiveerd en de iLevel-indicator wordt weergegeven op uw controller.

De iLevel-functie is bereikbaar via de controller of enkele schakelaar en de elektrische rolstoel moet zich op een vlakke ondergrond bevinden om iLevel te activeren. Nadat de actuator van het zitsysteem is gestart, remmen de iLevel-laarzen (zie figuur 3) de beweging van de voorste zwenkwielarmen af. Het zittingssysteem kan tot 20° achterover of omhoog worden gekanteld als de iLevel-functie is ingeschakeld.

LET OP: Raadpleeg de basishandleiding van uw controller voor meer informatie over de waarschuwingen en meldingen van iLevel.

De iLevel-functie dient alleen te worden gebruikt op vlakke en egale ondergronden binnenshuis, zoals in winkelcentra, kantoren en/of medische faciliteiten, en alleen op beperkte vlakke, egale en harde ondergronden buitenshuis.

Terwijl de iLevel-functie in gebruik is, de elektrische rolstoel kan rijden op een vooraf bepaalde, veilige snelheid. Raadpleeg de specificatietabel voor meer informatie over vermindering van de maximale snelheid.

WAARSCHUWING!

De iLevel-functie mag alleen worden gebruikt op een vlakke, vlakke ondergrond binnenshuis, zoals in winkelcentra, kantoren en/of medische faciliteiten. Breng de stoel nooit omhoog vanuit de laagste positie op een hellend of oneffen oppervlak of terwijl u probeert over een verhoogd of verlaagd oppervlak te rijden of te klimmen/dalen. Als u deze waarschuwing niet in acht neemt, kan dit ertoe leiden dat de elektrische rolstoel omvalt.

De iLevel-functie is bedoeld voor beperkt gebruik buitenshuis en uitsluitend op een vlakke, egale en harde ondergrond. Als u twijfels hebt over uw omgeving, gebruik iLevel dan niet buitenshuis.

De zitting mag nooit vanuit de laagste positie worden verhoogd als uw elektrische rolstoel wordt gebruikt op een hobbelige of ongelijke ondergrond. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot het omkiepen van de elektrische rolstoel.

De veiligheidsgordel moet altijd vastgemaakt zijn als de elektrische rolstoel wordt gebruikt.

De iLevel niet gebruiken en de zittinghoogte op geen enkele wijze veranderen terwijl de elektrische rolstoel zich onder een vast object bevindt, zoals een tafel of een bureau. Houd de omgeving vrij, zowel voorafgaand aan als tijdens verplaatsing.

VERBODEN!

Gebruik de iLevel® nooit buitenshuis op oneffen terrein (grind, heuvels of ander ongelijk, niet-compact terrein) of in een veld.

Gebruik iLevel® nooit tijdens het op- of afrijden van een stoeprand of oneffen oppervlak van welke hoogte dan ook.

LET OP: De iLevel-functie is voorzien van een systeem waarmee de elektrische rolstoel kan rijden op een vooraf bepaalde, veilige snelheid als de stoel is verhoogd. Controleer altijd of dit systeem correct functioneert voordat u de elektrische rolstoel in gebruik neemt.

LET OP: Als er een waarschuwing of een visuele melding verschijnt op uw controller met de melding dat de iLevel niet is ingeschakeld, wordt de snelheid van de elektrische rolstoel tot 25% verminderd als de stoel is verhoogd. Als deze waarschuwing verschijnt terwijl u zich op een vlakke ondergrond bevindt, stop dan met het gebruik van de iLevel-functie en vraag uw Quantum Rehab-leverancier om hulp.

Spatbordlichten (optioneel)

Uw elektrische rolstoel is mogelijk uitgerust met spatbordlichten. De lichten zijn samengesteld uit drie witte LED's aan de voorkant en drie rode LED's aan de achterkant en zijn gemonteerd op de spatborden van uw voedingsstation. **Zie figuur 4.**

LET OP: Controleer vóór het eerste gebruik of de lichtschakelaar van het spatbord is aangesloten.

LET OP: Als uw elektrische rolstoel is uitgerust met een begeleidersbediening, worden de spatbordlampen geactiveerd met behulp van de enkele schakelaar wanneer de controller wordt ingeschakeld.

De spatbordverlichting is verkrijgbaar in twee versies:

- Bediening via de combinatie controller/enkele schakelaar.
- Bediening via slechts één schakelaar.

Om de spatbordverlichting te activeren zonder de combinatie controller/enkele schakelaar:

1. Schakel de stroom naar de controller in.
2. Laat de joystick in elke richting bewegen.

Om de spatbordverlichting uit te schakelen met de combinatie controller/enkele schakelaar:

1. Schakel de stroom naar de controller uit OF druk op de enkele schakelaar.

LET OP: Als de enkele schakelaar wordt gebruikt om de lichten uit te schakelen, moet de enkele schakelaar worden gebruikt om de lichten weer in te schakelen voordat de lichten via de controller gaan werken.


Wanneer de elektrische rolstoel wordt uitgeschakeld, worden de spatbordverlichting gereset naar de automatische aan/uit-functie, als uw elektrische rolstoel daarmee is uitgerust.

Indien bediend via de combinatie controller/enkele schakelaar, zullen de spatbordverlichting inschakelen wanneer de elektrische rolstoel wordt ingeschakeld en de joystick in elke richting wordt bewogen. De elektrische rolstoel moet ingeschakeld blijven om de verlichting te laten branden. Wanneer de elektrische rolstoel wordt uitgeschakeld, gaan de lichten uit.

LET OP: Schakel de spatbordverlichting uit wanneer de elektrische rolstoel niet in gebruik is om de prestaties van de elektrische rolstoel per oplaadbeurt te optimaliseren.

Om de spatbordverlichting te bedienen met slechts één schakelaar:

1. Druk één keer op de enkele schakelaar om de spatbordverlichting te activeren.
2. Druk nogmaals op de enkele schakelaar om de spatbordverlichting uit te schakelen.

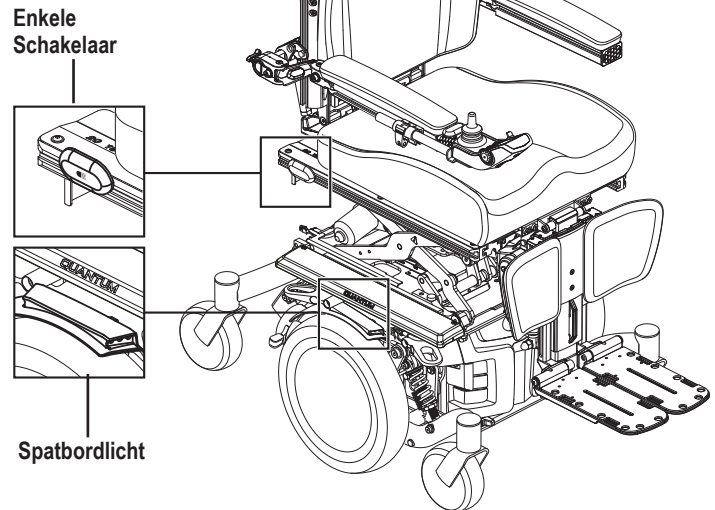

Figuur 4. Enkele schakelaar om spatbordlichten te bedienen

LET OP: De enkele schakelaar wordt gemonteerd met behulp van de meegeleverde stoffen sluiting. De locatie van de enkele schakelaar moet handig en functioneel zijn voor de gebruiker van de elektrische rolstoel. Mogelijke locaties zijn onder meer een armsteun, het zijhek, de controller of de hoofdsteun.

LET OP: Het plaatsen van de enkele schakelaar aan de buitenkant van de elektrische rolstoel, bijvoorbeeld op het zijhek, kan de totale breedte van de elektrische rolstoel vergroten.

WAARSCHUWING!

De enkele schakelaar moet worden gemonteerd op een locatie die handig is voor de gebruiker van de elektrische rolstoel en waar het schakelaarsharnas niet vast komt te zitten in aandrijfwielen of onderstel, bekneld raakt in het stoelframe of beschadigd raakt bij het passeren van deuropeningen.

Initial Assembly

Uw elektrische rolstoel kan wat montage gebruiken ofwel vóór het initiële gebruik of na transport. Het kan ook demontage vereisen om ook comfortaanpassingen te maken. **Figuur 5** detailleert die onderdelen van de elektrische rolstoel die ontworpen is om gedemonteerd en gemonteerd te worden door een eindgebruiker of door een gekwalificeerde zorgdrager vooraleer het product te gebruiken of comfortaanpassingen te maken.

LET OP: Elke nylon invoer sluitmoer, verwijderd tijdens de demontage of aanpassing van de elektrische rolstoel, moet vervangen worden door een nieuwe moer. Nylon invoer sluitmoeren moeten niet hergebruikt worden daar het schade kan berokkenen aan de nylon invoer, met als resultaat een minder stevige aanpassing. Vervangings nylon invoer blokkeermoeren zijn beschikbaar bij lokale hardware winkel of via uw Quantum Rehab Leverancier.

Zittingsinstallatie

Het kan nodig zijn om de zitting te installeren, ofwel vóór de initiële bediening of na transport van uw elektrische rolstoel. Omtrekzittingen zijn verbonden aan de vermogensbasis met het Universeel Montagesysteem (UMS). Het UMS bestaat uit universele onderdelen die kunnen verbonden zijn aan de zitting, ongeacht de zittingsbreedte of diepte. De twee hoofdcomponenten zijn aluminium extrusies, gemonteerd op de zittingsbasis. Deze extrusies hangen aan een paar trapezebars die gemonteerd werden op de vermogensbasis. Zie figuur 6.

LET OP: Indien uw elektrische rolstoel uitgerust is met een Specialiteitszitting, Synergy zitting of een TRUBalance® 3 Vermogen Positioneringssysteem, kijk naar de informatie geleverd in aparte handleidingen.

⚠ WAARSCHUWING!

Neem het zittingskader niet op aan de armsteunen. Ze zijn vrij om te draaien, en u kan controle van de zitting verliezen indien ze dit doen.


Om de zitting te installeren:

1. Zet de zitting schuin achteruit en glij de achter extrusie op de achterste trapezebar. Zie figuur 6.
2. Verlaag de voorste extrusie op de voorste trapezebar tot de zitting op zijn plaats blokkeert.
3. Draai de zittingsklinkveiligheid omlaag.


⚠ WAARSCHUWING!

Verzekert u ervan dat de zittingsklinkveiligheid omlaag gedraaid is vooraleer uw elektrische rolstoel te gebruiken.

4. Installeer de regelaar en richt het harnas naar de achterzijde van de vermogensbasis. Zie figuur 7, 8, or 9.
5. Sluit de regelaar verbinder aan in de achterzijde van de vermogensbasis. Zie figuur 1.
6. Bevestig het regelaarsharnas aan de armsteunontvanger met draadverbindingen. Zie figuur 8.

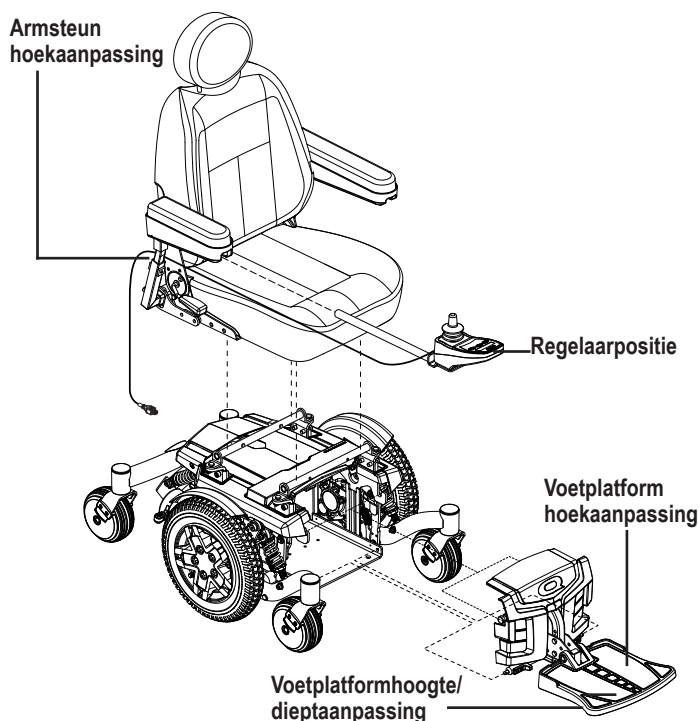


Figuur 5. Montagezicht

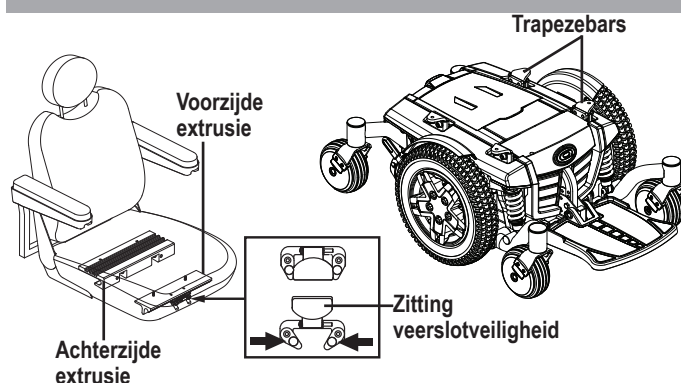

Figuur 6. Universeel montagesysteem en omtrekzittingseat

⚠ VERPLICHT!


Voorkom schade aan de controllerharnas! Leid de bedrading van de controller niet aan de buitenkant van het armsteunkussen. Leid het harnas onder de armsteun of naar de binnenkant van het armsteunkussen. Gebruik de juiste bevestigingspunten voor het harnas van de controller om te voorkomen dat het harnas vast komt te zitten in de wielen, bekneeld raakt in het stoelframe of beschadigd raakt bij het passeren van deuropeningen.

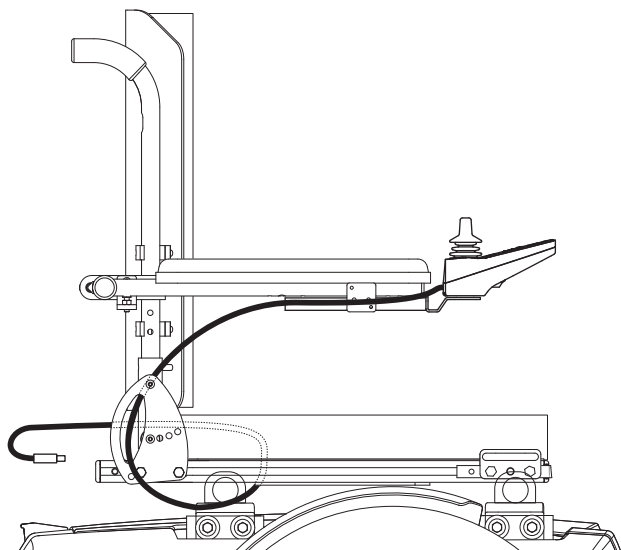

Figuur 7. Regelaar Harnas Routing op een Synergie Zitting



Figuur 9. Regelaar harnas routing op en TRU-Balance® 3

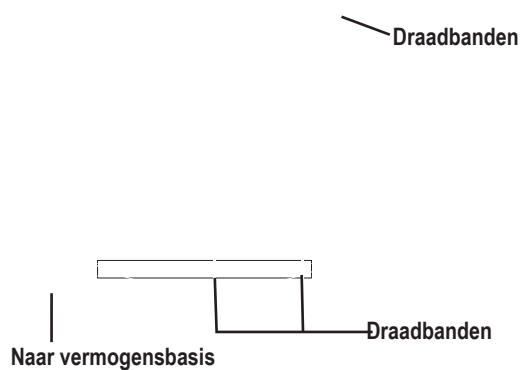

Figuur 8. Regelaar harnas routing op een omtrekzitting

Transitbeveiligingssysteem

Als uw elektrische rolstoel is uitgerust met een transportbeveiligingssysteem, is deze uitgerust met door de fabrikant geïnstalleerde bevestigingsbeugels aan de voor- en achterzijde en kan deze zijn uitgerust met bevestigingsbeugels voor de positioneringsgordel. **Zie figuur 10.** Raadpleeg het supplement dat bij uw elektrische rolstoel is geleverd voor informatie over het gebruik van het transportbeveiligingssysteem.

LET OP: In bepaalde configuraties is het transportbeveiligingssysteem niet beschikbaar op elektrische rolstoelen die zijn uitgerust met een HD-optie.

Uw elektrische rolstoel vervoeren

U kunt de elektrische rolstoel op twee manieren vastzetten:

1. Op de bevestigingspunten is een bevestigingssysteem van het riemtype aanwezig dat geschikt is voor de totale massavande elektrische rolstoelen voldoet aan ISO 10542-1, een internationale norm voor rolstoelbevestigings- en inzittendenbeveiligingssystemen (WTORS).

LET OP: Als u de bevestigingsmethode gebruikt, raadpleeg dan de afzonderlijke "Transit Securement Systems Guide" van Quantum Rehab.

2. Met een elektrische rolstoel van het docking-type en een bevestigingssysteem voor de inzittenden dat is getest en voldoet aan ISO 7176-19, een internationale norm die het testen van elektrische stoelen regelt voor gebruik als stoelen in motorvoertuigen

De elektrische rolstoel mag alleen worden vervoerd in voertuigen die zijn goedgekeurd voor deze aankoop.



WAARSCHUWING!

Bepaalde symbolen op de basis van uw elektrische rolstoel geven aan of uw elektrische rolstoel geschikt is voor BEZET of ONBEZET transport in een motorvoertuig. Raadpleeg de productveiligheidssymbolen afgebeeld en uitgelegd op pagina 6 van deze handleiding om te bevestigen of het symbool op uw elektrische rolstoel aangeeft dat deze geschikt is voor BEZET of ONBEZET transport in een motorvoertuig. Als u het symbool BEZET of ONBEZET niet kunt identificeren of lokaliseren, neem dan contact op met uw Quantum Rehab-leverancier voor hulp. Bovendien moet u, voordat u uw elektrische rolstoel in een motorvoertuig vastzet, alle instructies, waarschuwingen en opmerkingen lezen en opvolgen die zijn opgenomen in de Gids voor transportbeveiligingssystemen, die bij uw elektrische rolstoel wordt geleverd.

Bevestigingspunten van de elektrische rolstoel

Deze elektrische rolstoel is mogelijk voorzien van vier (4) bevestigingspunten voor het vastmaken van de lege elektrische rolstoel tijdens vervoer in een motorvoertuig. Ieder bevestigingspunt is duidelijk voor dit doel gelabeld.

Voor bevestiging van een elektrische rolstoel die is voorzien van bevestigingspunten:


- Bevestig de elektrische rolstoel in het voertuig altijd in de voorwaartse richting.
- Bevestig de vier bevestigingsriemen uitsluitend aan de hiervoor bedoelde en gelabelde bevestigingspunten voor vervoer. Deze punten worden op de elektrische rolstoel aangeduid door ankersymbolen. **Zie figuren 10 en 11.** Trek de riemen strak, zodat er geen speling bestaat.
- Bevestig de bevestigingsriemen nooit aan verstelbare, bewegende of verwijderbare onderdelen van de elektrische rolstoel, zoals armsteunen, tuigage aan de voorkant en wielen.
- Plaats de bevestigingspunten voor de achterste bevestigingsriemen onmiddellijk achter de achterste bevestigingspunten op de elektrische rolstoel. De voorste bevestigingsriemen dienen te worden vastgemaakt aan de vloerpunten die verder uit elkaar zijn geplaatst dan de elektrische rolstoel voor betere stabiliteit. **Zie figuur 11.**

VERPLICHT!


De elektrische rolstoel dient te worden gebruikt zoals aangegeven in de aanwijzingen van de fabrikant. U kunt contact opnemen met uw leverancier van Quantum, indien u nog vragen hebt over het juiste gebruik van uw elektrische rolstoel.

WAARSCHUWING!

De stoel van de elektrische rolstoel mag nooit worden verhoogd of verhoogd terwijl de elektrische rolstoel is vastgezet in een voertuig of in een bezette of onbezette transit. Het niet in acht nemen kan leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade.

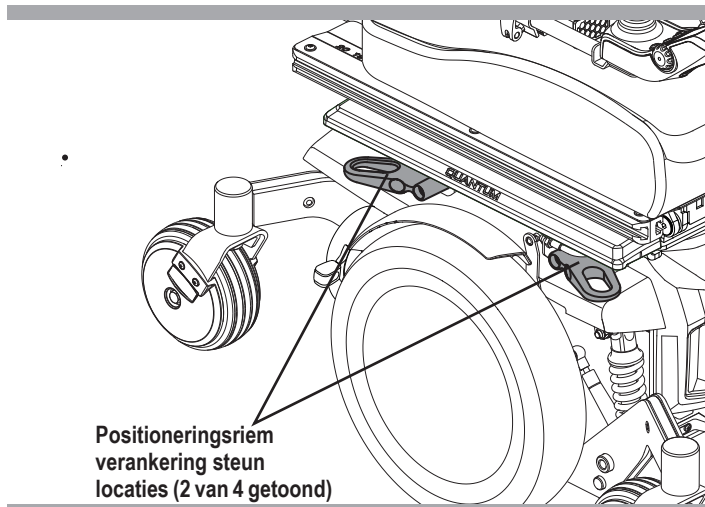

Figuur 10. Transitsysteem beveiligingssteunen

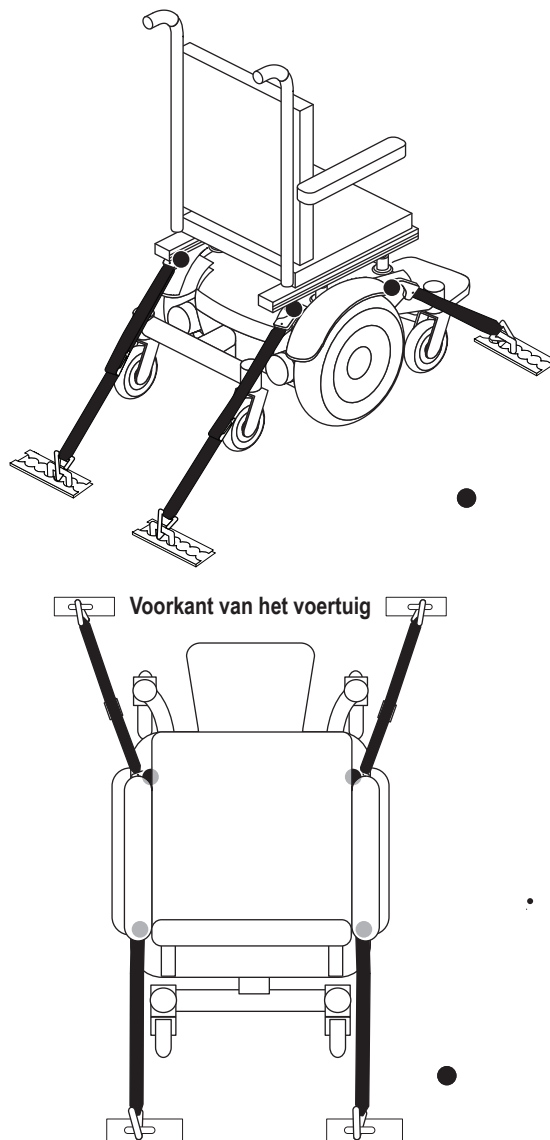

Figuur 11. Bevestigingspunten voor onbezett vervoersysteem

Comfortaanpassingen

vertrouwd te raken met de bediening van uw elektrische rolstoel, kan u het nodig vinden wat aanpassingen te maken om uw comfort te verhogen, zoals zittingshoogte en hoek, armsteunbreedte, armsteunhoek en -hoogte, voetplatformhoogte, diepte en hoek, en regelaarspositie.

LET OP: Indien uw elektrische rolstoel uitgerust is met een Synergie Zitting of TRU-Balance 3 Vermogen Positioneringssysteem, raadpleeg dan de zittingsaanpassing informatie, omvat in aparte handleidingen. Indien uw elektrische rolstoel uitgerust is met een omgeven zittingssysteem, raadpleeg dan de volgende informatie.

WAARSCHUWING!

Het zwaartekrachtscentrum van uw elektrische rolstoel was in de fabriek ingesteld op een positie die tegemoetkomt aan de noden van de demografische meerderheid van gebruikers. Uw Quantum Rehab Leverancier heeft uw elektrische rolstoel geëvalueerd en maakte noodzakelijke aanpassingen om tegemoet te komen aan specifieke vereisten. Wijzig uw zittingsconfiguratie niet zonder eerst de Pride Mobiliteitsproducten van uw Quantum Rehab Leverancier te contacteren.

Sommige elektrische rolstoel componenten zijn zwaar. U kan assistentie nodig hebben om ze te heffen of te dragen. Gelieve de specificatietabel te raadplegen voor specifieke componentengewichten voor u de elektrische rolstoel uitschakelt.

Verwijder de gebruiker van de elektrische rolstoel vooraleer mogelijke aanpassingen te maken.

U kan het volgende nodig hebben om comfortaanpassingen te maken:

- metrische/standaard contactdoosset en ratel
- aanpasbare moersleutel
- metrische/standaard zeshoekige sleutelset
- draadblokkering

Zittingshoogte en aanpassing zittingshoek


Indien uw elektrische rolstoel niet uitgerust is met een transit beveiligingssysteem kan u de zittingshoogte wijzigen in één van de drie posities door het verhogen van de vooren achter trapezebars. Indien u enkel één trapezebar (vooraan en achteraan) verhoogt en verlaagt, kan u ook de zittingsbasishoek wijzigen.

VERPLICHT!


Indien uw elektrische rolstoel uitgerust is met een transit beveiligingssysteem en een mogelijke aanpassing aan de zittingshoogte of zittingshoek is nodig, contacteer dan uw Quantum Rehab Leverancier. Deze comfortaanpassing kan enkel gemaakt worden door een Quantum Rehab Leverancier.

Om de zittingshoogte te wijzigen:

1. Schakel het vermogen naar de regelaar uit.

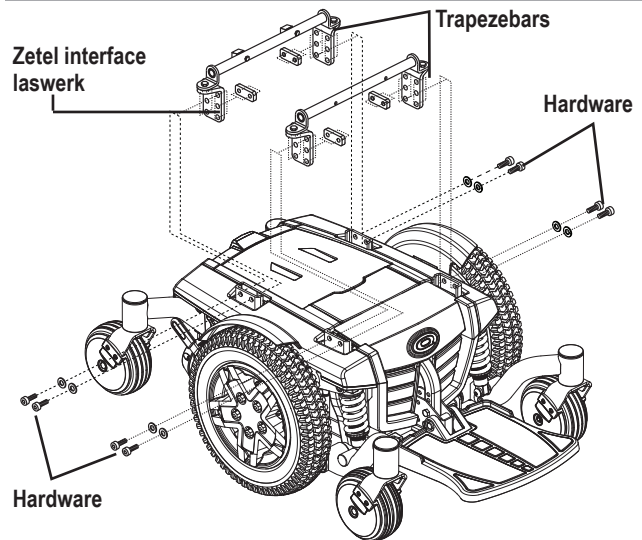

Figuur 12. Zittingshoogte/Hoekaanpassing

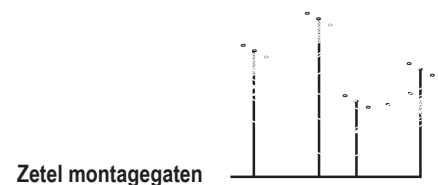

Figuur 13. Zetel positie instelling

2. Zorg ervoor dat de elektrische rolstoel in rijmodus staat.
3. Trek de stekker van de regelaarverbinder(s) uit de vermogensbasis. **Zie figuur 1.**
4. Kantel de zittingsgrendelveiligheid omhoog. **Zie figuur 6.**
5. Knijp de zittingsgrendel samen en maak de zitting los van de voorste trapezebar.
6. Glij de zitting voorwaarts en verwijder het van de vermogensbasis.
7. Verwijder de hardware die de trapezebarren verbindt met de zitting interfacelassen. **Zie figuur 14.**
8. Verplaats de trapezebarren op of neer naar de gewenste hoogte.

LET OP: Wijzig het zitvlak door maar één trapezebar (vooraan of achteraan) te verhogen of verlagen.

9. Herinstalleer de hardware.
10. Herinstalleer de zitting.
11. Herverbind de regelaar met de vermogensbasis.

Zitpositie

U kan de zitting voorwaarts of achterwaarts verplaatsen door het wijzigen van de extrusie montagepositie.

Om de positie te wijzigen:

1. Schakel het vermogen naar de regelaar uit.
2. Zorg ervoor dat de elektrische rolstoel in rijmodus staat.
3. Trek de stekker van de regelaarverbinder(s) uit de vermogensbasis.
4. Verwijder de zitting uit de vermogensbasis.
5. Verwijder beide extrusies van de bodem van de zitting.
6. Herpositioneer de extrusies op een andere set van montagegaten. U moet beide extrusies ofwel hetzelfde aantal gaten voorwaarts of achterwaarts verplaatsen.

Zie figuur 15.

7. Maak de extrusies vast aan de onderzijde van de zitting.
8. Herinstalleer de zitting.
9. Herverbind de regelaar met de vermogensbasis.

Manuele leun ruggesteun aanpassing

Indien uw elektrische rolstoel uitgerust is met een achteruitleunende zitting, kan u de ruggesteunhoek aanpassen met de ruggesteun vrijgavehendel. De hendel is te vinden aan de rechterzijde van de zittingsbasis.

Om de leunhoek aan te passen:

1. Optrekken aan de ruggesteun vrijgavehendel.
2. Leun voorwaarts of achterwaarts naar de gewenste positie.
3. Geef de hendel vrij.

Armsteun breedteaanpassing

Indien uw elektrische rolstoel uitgerust is met een aanpasbare ruggesteun, kan u dit aanpassen op vier (4) verschillende hoeken: 90°, 102°, 105°, of 107°.

Om de ruggesteunhoek aan te passen:

1. Verwijder de aanpassende schroeven van elk zittingsscharnier. **Zie afbeelding 14.**
2. Plaats de ruggesteun op de gewenste hoek.
3. Herinstalleer de aanpassende schroeven naar elk zittingsscharnier en draai vast.

Armsteun Breedteaanpassing

U kan elke armsteunbreedte, oafhankelijk van de andere, wijzigen.

OPMERKING: Het wijzigen van de armsteunbreedte kan de algemene breedte van uw elektrische rolstoel verhogen.

Om de armsteunbreedte te wijzigen:

1. Localiseer de twee armsteunknoppen aan elke zijde van de armsteun ontvangersteun. **Zie figuur 14.**
2. Draai de knoppen los.
3. Glij de armsteunen in of uit de gewenste breedte.
4. Draai de knoppen vast.

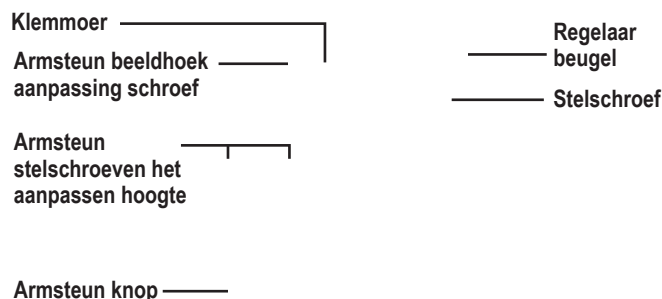


Figure 14. Rugleuning/Armsteun instelling

Armsteun hoekaanpassing**Om de armsteunhoek te wijzigen:**

1. Til de armsteun recht omhoog zodat het loodrecht op de grond staat. **Zie figuur 14.**
2. Draai de contra-moer los.
3. Draai aan de aanpassingsmoer om de voorzijde van de armsteun te verhogen of verlagen.
4. Draai de tegenmoer vast om de aanpassende schroef op zijn plaats te blokkeren.

Armsteun hoogteaangepassing**Om de armsteunhoogte te veranderen:**

1. Draai de twee instelschroeven, te vinden op de ontvanger van de armsteun, los. **Zie figuur 14.**
2. Verhoog of verlaag de armsteun op de gewenste hoogte.
3. Draai de stelschroeven om de armleuning beveiligen.

Regelaarpositie

U kunt de regelaar verplaatst te de richting van of uit de buurt de armsteun, of wijzig de positie van de regelaar for zowel links of rechts gebruik.

**WAARSCHUWING!**

Plaats de regelaar harnas zodat het niet kan worden ingeklemd te de zitframe of de bevoegdheid basisframe.

To extend the controller:

1. Te zetten eerst het armsteun zodat het loodrecht op de vloer.
2. Los te maken de stelschroef op de regelaar beugel. **Zie figuur 14.**
3. Schuif de regelaar in of uit van het armsteun op de gewenste positie.
4. Draai de instelschroef vast om de regelaar vast te zetten.

Om de positie van de regelaar te wijzigen:

1. Schakel het vermogen naar de regelaar uit.
2. Trek de stekker van de regelaarverbinder(s) uit de vermogensbasis.
3. Ontkoppel de regelaar aansluiting(en) van de elektrische eenheid.
4. Te zetten eerst het armsteun zodat het loodrecht op de vloer.
5. Los te maken de stelschroef op de regelaar beugel.
6. Schuif de regelaar out van het armsteun.
7. Draai de instelschroef in de andere armsteun los.
8. Plaats de regelaar in de andere armsteun.
9. Draai de instelschroeven in beide armsteunen vast.
10. Route de regelaar harnas aan de achterkant de elektrische eenheid en sluit de regelaar.
11. Vast te zetten de regelaar harnas op de armsteun met kabelbinders. Zie figuur 8.

LET OP: Als uw elektrische rolstoel is uitgerust met een Synergie zetel, of TRU-Balance 3 Vermogen Positioneringssysteem, raadpleegt u in informatie verstrekt te aanvullende handleidingen verstrekt met uw zitsysteem.

Voet platform hoogte-instelling

De voet platform hoogte wordt eenvoudig in te stellen naar verschillende hoogtes.

Om verhogen of te verlagen de voet platform:

1. Verwijder de hardware van de voet-platform beugel. **Zie afbeelding 15.**
2. Verhogen of te verlagen de voet-platform op de gewenste hoogte.
3. Opnieuw installeren de hardware in de voet-platform beugel en draai.

Diepte van het voet platform Aanpassing

U kunt de diepte van de voet-platform aanpassen

Te aanpassen de diepte van de voet-platform:


1. Verwijder de hardware van de voet-platform beugel. **Zie afbeelding 15.**
2. Bewegen de voet-platform te of uit op de gewenste diepte.
3. Opnieuw installeren de hardware in de voet-platform beugel en draai.

Voet-platform hoekaanpassing

U kunt aanpassen de beeldhoek van het voet-platform.

Te aanpassen de voet-platform beeldhoek:

1. Te zetten eerst het voet-platform en zoek de screw. **Zie afbeelding 16.**
2. Draai de schroef om verhogen of te verlagen de voorkant van het voet-platform.

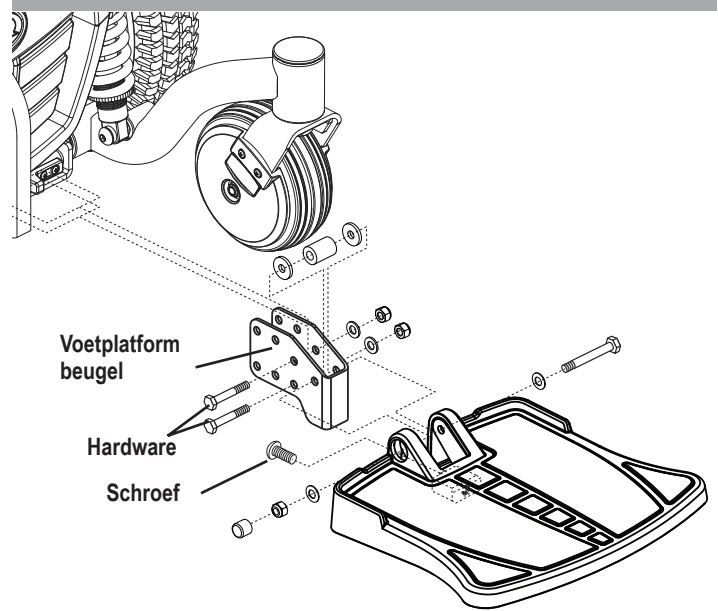

Figuur 15. Voet platform instelling

Gordel

Uw elektrische rolstoel kan uitgerust worden met een gordel die kan worden aangepast voor bestuurderscomfort. **Zie figuur 16.** De gordel wordt ontworpen om de bestuurder te ondersteunen zodat hij/zij niet beneden glijden of naar voren in de zetel. De gordel wordt niet ontworpen voor gebruik als een remmende apparaat.

WAARSCHUWING!

De positioneringsgordel is niet bedoeld voor gebruik als autogordel in een motorvoertuig. Iedereen die in een voertuig reist, moet correct worden vastgemaakt op stoelen die zijn goedgekeurd door de voertuigfabrikant. Uw elektrische rolstoel is niet geschikt om als zitplaats in een voertuig te worden gebruikt, met de volgende uitzondering: Het voertuig moet zijn uitgerust met een rolstoelvastzet- en inzittendenbeveiligingssysteem (WTORS) dat is geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant van het vaststijgen, n voldoet aan ANSI/RESNA WC/Vol. 4, Sectie 18/ISO 10542-normen, en de elektrische rolstoel moet een transportbeveiligingssysteem hebben dat voldoet aan ANSI/RESNA WC/Vol. 4, Sectie 19/ISO 7176-19-normen. Het is essentieel om een complete WTORS te gebruiken om de elektrische rolstoel aan het voertuig te bevestigen en om de gebruiker van de elektrische rolstoel te voorzien aan een goed ontworpen en getest veiligheidssysteem. Een bevestigingssysteem met zowel bekken- als bovenlichaamsgordels moet worden gebruikt om de inzittende van de elektrische rolstoel te beschermen en de kans op letsel veroorzaakt door contact met het voertuig tijdens een botsing of plotseling remmen te minimaliseren.

De plaatsingsriem dient te allen tijde bevestigd te zijn. Laat de plaatsingsriem nooit op de grond hangen of slepen, zodat deze niet verstrikt kan raken



Figure 16. Positioning Belt Adjustment

Om de gordel te installeren:

1. Verwijder de achterste schroef waarmee houdt de zetel scharnier op de onderstel van de zitting op beide de links en rechts zetel hinges.
2. Steek de schroef met de meegeleverde ring, met de gordel en in de onderstel van de zitting voor elke zijde van het elektrische rolstoel zetel.
3. Draai beide screws.

Te aanpassen de gordel voor bestuurderscomfort:

1. Zodra gezeten, steek de metalen tabblad aan de ene kant van het gordel in de kunststof behuizing aan de andere kant tot u een klik hoort. **Zie figuur 16.**
2. Trek de overtollige band gekoppeld aan de metalen tab totdat het wordt veilig, maar niet zo strak dat het ongemak veroorzaken.

Vrij te geven de gordel:

1. Druk de drukknop mechanisme op de kunststof behuizing..

VERPLICHT!

Zorg ervoor dat de gordel wordt goed beveiligd op de elektrische rolstoel en wordt aangepast voor bestuurderscomfort voor elk gebruik.

Inspecteer de veiligheidsriem op losse onderdelen of beschadiging, inclusief scheuren, versleten plekken, verbogen, onderdelen, beschadigde gespmechanismen, vuil of restanten, voorafgaand aan ieder gebruik van de elektrische rolstoel. Als u een probleem ontdekt, neem dan contact op met uw Quantum Rehab leverancier voor onderhoud en reparatie.

Batterijen en opladen

De elektrische rolstoel maakt gebruik van twee langdurige, 12-volt, goed behandelde batterijen. Deze batterijen zijn gesloten en onderhoudsvrij. Omdat ze worden gesloten, Er wordt geen behoefte om te controleren de electrolyt (vloeistof) niveau. Goed behandelde batterijen zijn ontworpen to handle om een langer en dieper ontladen. Hoewel ze lijken op automobiellaccu's, zijn ze niet uitwisselbaar. Automotive batterijen zijn niet ontworpen om een lange, diepe ontlading te behandelen, en ook niet veilig voor gebruik te elektrische rolstoelen.



VERPLICHT!

Batterij berichten, terminals, en aanverwante accessoires bevatten lood en lead verbindingen. Draag handschoenen en bril bij het verwerken van batterijen en handen wassen na het hanteren.



WAARSCHUWING!

Neem contact op met uw Quantum Rehab leverancier als u vragen heeft over de batterijen te uw elektrische rolstoel.



VERBODEN!

Gebruik altijd twee batterijen van het exact hetzelfde type, chemie, en amp-uur (Ah) capaciteit. Raadpleeg tabel van de specificaties te dit handboek en te de handleiding met de batterijoplader voor aanbevolen type en capaciteiten.

Opladen van de batterijen

De acculader wordt essentieel bij het verstrekken van lange levensduur voor uw elektrische rolstoel batterijen. Het wordt ontworpen om uw elektrische rolstoel prestaties optimaliseren door het opladen van de batterijen, veilig, snel en gemakkelijk.

VERBODEN! Verwijdering van aarding prong kunt elektrische gevaar maken. Indien nodig, installeer een goedgekeurde 3-polige adapter aan op een stopcontact met 2-polige stekker toegang hebben.

VERBODEN! Gebruik nooit een verlengsnoer aan te sluiten te uw acculader. Sluit de lader rechtstreeks op een goed vast standard stopcontact.

VERBODEN! Laat niet kinderen zonder toezicht in de buurt te spelen van de elektrische rolstoel terwijl de batterijen zijn opladen. Quantum Rehab recommends waarmee je doet niet laad de batterijen terwijl de elektrische rolstoel wordt bezet.

VERPLICHT! Lees de instructies van de acculader op dit handboek en te de handleiding met de batterijoplader tevoren opladen de batterijen.

WAARSCHUWING! Explosieve gassen kunnen vrijkomen tijdens het opladen van de batterijen. Houd de elektrische rolstoel en de acculader uit de buurt van ontstekingsbronnen zoals vlammen of vonken en zorg voor voldoende ventilatie tijdens het opladen van de batterijen.

WAARSCHUWING! U moet opladen de elektrische rolstoel batterijen met de meegeleverde acculader van off-board opladen. Gebruik niet een auto-type batterijlader.

WAARSCHUWING! Inspecteren de acculader, bedrading, en connectors voor schade voor elk gebruik. Neem contact op met uw Quantum Rehab leverancier als schade wordt gevonden.

WAARSCHUWING! Probeer niet om te openen de batterij lader zaak. Als de batterijoplader niet goed te werken, neem contact op met uw Quantum Rehab leverancier.

WAARSCHUWING! Wees ervan bewust dat de batterij lader zaak warm tijdens het opladen worden kan. Vermijd contact met de huid en zet niet op oppervlakken die kunnen worden beïnvloed door de warmte.

WAARSCHUWING! Als de batterijlader is uitgerust met koeling hopen, dan niet probeert in te voegen objecten door deze hopen.

WAARSCHUWING! Als uw batterijoplader is niet getest en goedgekeurd voor gebruik buitenshuis, dan niet blootgesteld aan schadelijke of extreme weersomstandigheden. Als de batterijoplader wordt blootgesteld aan schadelijke of extreme weersomstandigheden, moet dan het worden toegestaan om aan te passen aan het verschil in de omgevingscondities tevoren gebruik binnenshuis. Raadpleegt u de handboek met de batterijoplader voor meer informatie.

Om de batterijen met behulp van de off-board oplader:

1. Plaats uw elektrische rolstoel naast een standaard stopcontact.
2. Worden bepaalde de controller stroom wordt uitgeschakeld en de elektrische rolstoel is in rijstand.
3. Steek de off-board lader in de off-board lader/ programmeer aansluiting op de controller. **Zie figuur 17.**
4. Steek de off-board oplader in het stopcontact.
5. Wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen, koppelt u de off-board lader uit het stopcontact en vervolgens uit de controller.

 WAARSCHUWING!

De LED-lampjes op de lader geven verschillende oplader omstandigheden op verschillende tijdstippen: lader stroom aan, bezig met opladen, en het opladen is voltooid. Als de LED niet aangeeft dat het opladen voltooid is binnen 24 uur, haalt u de lader uit het stopcontact en neemt u contact op Quantum Rehab leverancier. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de lader voor een complete uitleg van de indicaties.

Waarschuwing laderindicatie:

Wanneer uw elektrische rolstoel is aangesloten om op te laden, geeft uw controller het opladen en de rijblokkering aan door de batterij-indicator continu te laten scrollen (indicatie bepaald door de elektronica van uw elektrische rolstoel).

LET OP: Uw elektrische rolstoel kan accessoires of stoelfunctiebediening hebben die gebruik maken van het laadcircuit van de voedingsmodule voor functionaliteit en/of rijblokkering. Als u merkt dat uw batterij-indicatoren scrollen en de rit wordt geblokkeerd, maar de oplader is niet op de controller aangesloten, controleer dan uw zitpositie of bel uw geautoriseerde Quantum-leverancier.

Batterij breken in

Te breken in nieuwe batterijen voor een maximale efficiëntie:

1. Volledig op te laden elke nieuwe batterij voor het eerste gebruik. Dit brengt de batterijen tot 90% van de top prestatie.
2. Bedien uw elektrische rolstoel door het hele huis en erf. Beweeg eerst langzaam, en rij niet te ver totdat je wennen aan de besturing en breken in de accu's.
3. Geef de batterijen nog een volledige lading van ten minste 8 bij 14 uur en opnieuw en gebruik de elektrische rolstoel. De batterijen zal nu optreden op meer dan 90% van hun potentieel.
4. Na vier of vijf opladen cycli boven de batterijen uit 100% kosten en laatst voor een langere periode.

Veelgestelde vragen (FAQ's)**Figuur 17. Batterij en opladen****Hoe werkt de lader?**

De accu-lader duurt het standaard stopcontact spanning van AC (wisselstroom) en zet deze om tot 24V DC (gelijkstroom) De elektrische rolstoel batterijen gebruik gelijkstroom uit te voeren uw elektrische rolstoel. Als de accuspanning laag is, werkt de lader harder opladen van de batterij. Als de accuspanning nadert volledig is opgeladen, gaat de lader niet zo hard werken om de laadcyclus te voltooien. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, de stroomsterkte van de lader is bijna op nul. Dit is hoe de lader een lading onderhoudt, maar worden ze niet overladen van de batterij.

Kan ik een andere lader gebruiken?

U moet gebruik maken van de lader die bij de elektrische rolstoel. Het is de veiligste, meest efficiënte hulpmiddel om Laad de batterijen. We raden niet met behulp van andere soorten laders (bijvoorbeeld een auto lader).

LET OP: Uw elektrische rolstoel lader werkt niet nadat de batterijen zijn ontladen tot bijna nul spanning. Als dit gebeurt, belt u uw Quantum Rehab leverancier voor hulp.

Hoe vaak moet ik de batterijen opladen?

Veel factoren spelen een rol bij de beslissing hoe vaak de accu's te laden. U kunt gebruik maken van uw elektrische rolstoel de hele dag op een dagelijkse basis of u kunt deze niet gebruiken voor weken in een tijd.

■ Dagelijks gebruik

Als u uw elektrische rolstoel te gebruiken op een dagelijkse basis, laad de batterijen zodra u klaar bent met uw elektrische rolstoel. Uw elektrische rolstoel zullen klaar elke ochtend om u een volledige dag dienst. Het wordt aanbevolen dat u laad de batterijen ten minste 8 bij 14 uur na dagelijks gebruik. Pride aanbevolen dat u de batterijen voor een extra 4 uren opladen achter de acculader geeft aan dat het opladen is voltooid.

■ Zeldzaam gebruik

Als u uw stoel macht zelden gebruikt (een keer per week of minder), moet u de batterijen ten minste eenmaal per week gedurende ten minste 24 uur opladen.

LET OP: Houd uw batterijen volledig opgeladen en vermijd diep ontladen uw batterijen. Raadpleegt u de handboek met de batterijoplader voor opladen instructies. Pride raadt aan uw batterijen opladen voor continu ten minste 48 uur één keer per maand om batterijprestaties en levensduur van de batterij te verbeteren.

Hoe kan ik krijgen maximale bereik of afstand per lading?

Zelden heb je een ideale drijvende situatie zoals gladde, platte en moeilijk terrein met geen wind, heuvels of curven. Steeds vaker wordt u aangeboden met heuvels, stoep scheuren, losjes verpakt en ongelijke oppervlakken, curven en wind. Al deze factoren van invloed op de afstand of hardlopen tijd per batterijlading. Hieronder zijn enkele suggesties voor het verkrijgen de maximale bereik per lading:

- Altijd laad de batterijen volledig voorafgaand aan uw reis.
- Plan uw reis van tevoren om te voorkomen dat hellingen indien mogelijk.
- Bagage gewicht aan essentiële items beperken.
- Probeer te houden een zelfs snelheid en vermijden stop-and-go rijden.
- Quantum Rehab raadt aan uw batterijen opladen voor continu ten minste 48 uur één keer per maand om batterijprestaties en levensduur van de batterij te verbeteren.

Wat voor soort batterijen moet ik gebruiken?

We raden goed behandelde batterijen waarmee zijn gesloten en onderhoudsvrij. AGM en Gel-cel zijn deep-cycle batterijen met dezelfde prestaties. Raadpleegt u de tabel met specificaties Voor meer informatie over de batterijen gebruikt met uw elektrische rolstoel.



WAARSCHUWING!

Bijtende chemische stoffen in batterijen. Gebruik alleen AGM of Gel-Cell batterijen om het risico van lekkage of explosieve voorwaarden.

Waarom lijken mijn nieuwe batterijen zwak?

Goed behandelde batterijen gebruiken een veel verschillende chemische technologie dan dat gebruikt te car batterijen, nikkel-cadmium (nicads), of in andere gemeenschappelijke soorten batterijen. Goed behandelde batterijen zijn toegesneden op de stroomvoorziening, afvoer naar beneden hun lading en accepteer een relatief snel herladen. AGM en Gel-Cell batterijen moeten zo vaak worden opgeladen als mogelijk. Ze hebben niet een "geheugen" zoals nikkelcadmium-batterijen..

Wij werken nauw samen met onze batterij fabrikant om eenbatterij die het beste past bij uw elektrische rolstoel specifieke eisen bieden. Nieuwe batterijen komen regelmatig bij Pride en worden snel verzonden met een volle lading. Tijdens het vervoer, de batterijen extreme temperaturen tegen dat de eerste prestaties kunnen beïnvloeden. Hitte

berooft de lading van de accu, en koude vertraagt het beschikbare vermogen en verlengt de tijd die nodig is om de batterij op te laden (net als bij een auto-accu).

Het kan een paar dagen duren voor de temperatuur van de accu te stabiliseren en aan de nieuwe omgevingstemperatuur aan te passen. Wat nog belangrijker is, duurt het een paar "laadcycli" (een gedeeltelijke afvoer—vervolgens een volledig opgeladen) om de kritische chemische balance die essentieel is voor piek van de batterij prestaties en een lange levensduur vast te stellen. Het zal de moeite waard om de tijd om goed te breken in uw batterij te nemen.

Hoe kan ik zorgen voor een maximale levensduur van de batterij?

Een volledig opgeladen deep-cycle accu levert betrouwbare prestaties en een langere levensduur van de batterij. Houd uw elektrische rolstoel batterijen volledig geladen waar mogelijk. Accu's die diep ontladen zijn, onregelmatig geladen of opgeslagen zijn zonder een volle lading, kunnen permanent beschadigd worden, waardoor onbetrouwbare elektrische rolstoel gebruik en een beperkte levensduur van de batterij.

LET OP: De gebruiksduur van een batterij is vaak een weerspiegeling van de zorg die zij ontvangt.

Hoe moet ik mijn elektrische rolstoel en de batterijen?

Als u niet regelmatig gebruik maken van uw elektrische rolstoel, raden wij onderhouden batterij vitaliteit door het opladen van de accu's ten minste een keer per week.

Als u niet regelmatig gebruik maken van uw elektrische rolstoel, raden wij onderhouden batterij vitaliteit door het opladen van de accu's ten minste een keer per week. Maak de behuizing van de accu en berg de elektrische rolstoel in een warme, droge omgeving. Vermijd extreme temperaturen, zoals bevriezing en erg warme omstandigheden, en probeer nooit een bevroren accu op te laden. Een koude of bevroren accu verwarmd worden enkele dagen voor opladen.

Hoe zit het met het openbaar vervoer?

AGM- en Gel-Cell-batterijen zijn ontworpen voor toepassing n elektrische rolstoelen en andere mobiliteitsvoertuigen. Deze batterijen voldoen aan de vereisten van de Federal Aviation Administration (FAA) (alleen Verenigde Staten), waardoor ze veilig kunnen worden vervoerd in vliegtuigen, bussen en treinen, aangezien er geen gevaar is voor morsen of lekken. We raden u aan om vooraf contact op te nemen met de ticketbalie van de vervoerder om de specifieke vereisten van die vervoerder te bepalen.

Hoe zit het met verzendkosten?

Als u een vracht bedrijf gebruiken om uw elektrische rolstoel verzenden naar uw eindbestemming, verpak uw elektrische rolstoel in de originele verpakking en het schip van de batterijen in aparte dozen.

Verzorging en onderhoud

Uw elektrische rolstoel is een geavanceerd elektrische rolstoel. Net als een gemotoriseerd voertuig, het vereist regelmatig onderhoud controles. U kunt een aantal van deze controles, maar anderen hulp nodig hebben van uw Quantum Rehab leverancier. Preventief onderhoud is erg belangrijk. Als u de controles en onderhoudswerkzaamheden in deze sectie zoals gepland, kunt u ervoor zorgen dat uw elektrische rolstoel geeft u jarenlang probleemloos gebruik. Als u twijfelt over uw elektrische rolstoel de zorg of de werking, contact op met uw Quantum Rehab leverancier.

WAARSCHUWING!

Gebruik geen onderhoud aan de elektrische rolstoel wanneer de stoel bezet is.

Uw elektrische rolstoel, net als de meeste elektrische apparatuur, is gevoelig voor schade als gevolg van de elementen. Vermijd vochtige gebieden van welke aard ook.

WAARSCHUWING!

Rechtstreekse of langdurige blootstelling aan water of vocht kan leiden tot de elektrische rolstoel een storing elektronisch en mechanisch. Water kan elektrische componenten te corroderen en de stoel frame van te roesten. Vermogen stoelen dienen periodiek te worden onderzocht op tekenen van corrosie veroorzaakt door blootstelling aan water, lichaamsvloeistoffen blootstelling, of incontinentie. Beschadigde onderdelen moeten worden vervangen of onmiddellijk behandeld.

Mocht uw elektrische rolstoel in contact komen met water:

1. Droog uw elektrische rolstoel zo goed mogelijk met een handdoek.
2. Laat uw elektrische rolstoel op een warme, droge plaats zitten gedurende 12 uur, zodat onzichtbare water kan verdampen.
3. Controleer de joystick en de remmen voordat u uw elektrische rolstoel weer.
4. Als er inconsistenties worden gevonden, neem uw elektrische rolstoel naar een Quantum Rehab leverancier. Macht stoelen die vaak worden blootgesteld aan bronnen van water, zoals incontinentie, moet vaak worden gecontroleerd op corrosie en elektronische componenten moeten regelmatig worden vervangen.

Temperatuur

- Hoewel uw elektrische rolstoel bestand is tegen kortstondige opslagtemperaturen tussen -40°C (-40°F) tot 65°C (149°F), wordt aanbevolen dat langdurige opslagtemperaturen tussen -25°C (-13°F) tot 50°C (122°F). Ideale opslagomstandigheden zijn waar mogelijk 20°C (68°F) tot 21°C (70°F), maar we realiseren ons dat dit niet altijd haalbaar is vanwege verschillende klimaten en omgevingen.
- Bij extreem lage temperaturen kunnen de accu's bevroren. De specifieke temperatuur waarbij bevroren afhankelijk van een aantal factoren, zoals batterij, het gebruik en de samenstelling van de batterijen (bijvoorbeeld AGM of gel cel).

Algemene richtlijnen

- Vermijd stoten of botsen de controller, vooral de joystick.
- Vermijd langdurige blootstelling van uw elektrische rolstoel aan extreme omstandigheden, zoals hitte, koude of vocht.
- Houd de controller schoon.
- Controleer alle connectoren om ervoor te zorgen dat ze goed allemaal strak en beveiligd.
- Zorg ervoor dat luchtbanden worden opgepompt tot de psi / bar / kPa luchtdruk zoals die aangegeven op de band.

WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat uw banden worden opgepompt tot de psi / bar / kPa luchtdruk zoals die aangegeven op de band voor luchtbanden. Niet veel of te weinig Blaas uw banden. Lage druk kan leiden tot verlies van controle, en te hoge banden kunnen barsten. Overinflatie banden kunnen ervoor zorgen dat ze ontploffen.

Gebruik geen hoge druk slang om uw banden op te pompen.

- Gebruik een rubberen conditioner op de wangen van de band om hen te helpen behouden.

WAARSCHUWING!

Gebruik nooit een rubberen conditioner op het loopvlak van de banden, anders kan maken van de banden glad en ertoe leiden dat uw elektrische rolstoel te slippen

- Alle wiellagers zijn smeermiddel behandelde en verzegeld. Ze vereisen geen verdere smering.
- Als uw elektrische rolstoel een omhulsel heeft met een **glanzende afwerking**, dan is die gesprayd met een doorzichtige verzegelende coating. U kunt een dun laagje auto was aanbrengen om de glanzende afwerking te behouden. Als uw elektrische rolstoel een omhulsel heeft met een **matte afwerking**, gebruik dan UITSLUITEND producten die speciaal gemaakt zijn voor matte verf. Gebruik geen was, detail spray, ArmorAll®, of enig ander product wat gemaakt is voor glansverf.

WAARSCHUWING!

Kies zorgvuldig het juiste product om de afwerking van uw elektrische rolstoel te beschermen. UITSLUITEND producten die ontwikkeld zijn voor matte verf moeten gebruikt worden op afwerkingen met matte verf. Als deze waarschuwing niet in acht genomen wordt, kan dat beschadigingen opleveren voor de afwerking van de matte verf.

- Controleer alle elektrische verbindingen. Zorg ervoor dat ze goed vast zitten en niet verroest. Accu's moeten vlak zitten in de accubak, met de accupolen naar achteren. Raadpleeg de accu bedrading label voor de juiste bedrading lay-out.

WAARSCHUWING!

Hoewel de elektrische rolstoel aan de vereiste testvoorschriften betreffende het binnendringen van vloeistoffen voldoet, dient u elektrische aansluitingen uit de buurt van vocht, met inbegrip van rechtstreekse blootstelling aan water of lichaamsvloeistoffen en incontinentie. Controleer regelmatig elektrische componenten op tekenen van corrosie en vervang ze indien nodig.

Dagelijkse controles

- Met de controller is uitgeschakeld, controleert u de joystick. Zorg ervoor dat het niet verbogen of beschadigd en dat het terugkeert naar de neutrale positie wanneer u haar loslaat. Controleer de rubber boot rond de basis van de joystick op beschadigingen. Inspecteer de boot. Raak of probeer te repareren. Zie uw Quantum Rehab Leverancier als er een probleem is.
- Inspecteer de regelaar harnas. Zorg ervoor dat het niet is versleten, defect, of heeft blootgesteld geen draden. Zie uw Quantum Rehab Leverancier als er een probleem is.
- Controleer op gladde plekken op massieve banden. Vlakke plekken kan een negatieve invloed stabiliteit.
- Inspecteer het zitsysteem, armleuningen, en front tuigage voor losse hardware, stress punten, of schade. Zie uw Quantum Rehab Leverancier als er een probleem is.

Wekelijkse controles

- Ontkoppel en controleer de regelaar van de machtsbasis. Kijk voor corrosie. Neem contact op met Quantum Rehab Provider indien nodig.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen van de controller stevig zijn bevestigd aan uw elektrische rolstoel. Niet te strak de schroeven.
- Controleer de correcte bandenspanning. Luchtbanden moeten worden opgepompt tot de psi / bar / kPa luchtdruk zoals die aangegeven op elke band. Als een band niet in het bezit lucht, raadpleeg dan uw Quantum Rehab leverancier voor vervanging van de buis.
- Controleer de remmen. Deze test moet worden uitgevoerd op een vlakke ondergrond met minstens 1 meter (3 voet) van vrije ruimte rondom uw rolstoel.

Om de remmen te controleren:

1. Zet de stuureenheid en zet de snelheid van uw elektrische rolstoel.
2. Na een seconde, controleert u de batterij conditie meter. Zorg ervoor dat het blijft branden.
3. Langzaam naar voren te duwen op de navigatieknop totdat u hoort dat de elektrische remmen klik. Laat onmiddellijk de joystick. U moet in staat zijn om elke elektrische rem operationele hoort binnen een paar seconden van beweging van de joystick. Herhaal deze test drie keer, de joystick naar achteren, dan naar links en dan naar rechts.

Maandelijkse controles

- Controleer rijden bandenslijtage. Zien uw Quantum Rehab leverancier voor reparatie.
- Controleer de zwenkwielen op slijtage Vervang ze wanneer dat nodig is.
- Controleer de zwenkwielvorken op beschadiging of op fladderen, dit betekent dat ze moeten worden aangepast of dat de lagers vervangen moeten worden. Zien uw Quantum Rehab leverancier voor reparatie.
- Controleer de gehele elektrische rolstoel op losse hardware en veranderingen in de functie en prestaties van de elektrische rolstoel. Zie uw Quantum Rehab leverancier voor onderhoud of reparatie.
- Houd uw elektrische rolstoel schoon en vrij van vreemde materialen, zoals modder, vuil, haar, voedsel, drank, etc.
- Veerschokken en gasdempers dienen visueel te worden gecontroleerd op alle afwijkingen, structuur schade of gebogen staven. Zien uw Quantum Rehab leverancier voor reparatie.

Jaarlijkse controles

Breng uw elektrische rolstoel naar uw Quantum Rehab leverancier voor jaarlijks onderhoud, vooral als u uw elektrische rolstoel dagelijks gebruikt. Dit helpt ervoor te zorgen dat uw elektrische rolstoel naar behoren functioneert en helpt toekomstige complicaties te voorkomen.

Berging

Uw elektrische rolstoel moet worden opgeslagen op een droge plaats, vrij van extreme temperaturen. Ontkoppel de batterijen van de elektrische rolstoel als u deze opbergt. Zie "Batterijen en Opladen."

WAARSCHUWING!

Indien u de unit niet naar behoren opbergt, kan het frame gaan roesten en kan de elektronica beschadigd worden. Elke gecorrodeerde elektronische verbinding moet worden vervangen.

Batterijen die regelmatig en sterk ontladen zijn, zeldzaam worden opgeladen, opgeborgen worden bij extreme temperaturen, of opgeborgen worden zonder volledig opgeladen te zijn, kunnen permanent beschadigd worden wat onbetrouwbare prestaties en een beperkte levensduur veroorzaakt. Het wordt aanbevolen dat u de batterijen periodiek oplaadt gedurende langere opslagperioden om een goede prestatie te verzekeren.

U kunt beter enkele planken onder het frame van uw rolstoel plaatsen om deze van de grond te houden gedurende langere opslagperioden. Dit neemt het gewicht van de banden en vermindert de kans op de ontwikkeling van vlakke plekken op de delen van de banden die de grond raken.

Hoe u zich ontdoet van uw elektrische rolstoel

Uw elektrische rolstoel dient u weg te doen volgens de lokale en nationale wettelijke regulaties. Neem contact op met uw lokale dienst voor afvalverwerking voor informatie over de juiste manier om u te ontdoen van de verpakking van de elektrische rolstoel, metalen frame onderdelen, Kunststofonderdelen, elektronica, batterijen, neopreen, siliconen en polyurethane materialen.

⚠ WAARSCHUWING!

Plastic zakken zijn verstikkingsgevaar. Gooi plastic zakken op de juiste manier weg en laat kinderen niet met ze spelen.

Reiniging en desinfectie

Bij het reinigen van medische apparatuur/apparaten moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico op verspreiding van infecties te verkleinen. Dit om de verspreiding van ziekte en ander potentieel infectieus materiaal (OPIM) (bloedbestanddelen) te beperken.

- Gebruik een vochtige doek en een milde, nietschurende reiniger om de plastic en metalen delen van uw elektrische rolstoel schoon te maken. Vermijd het gebruik van producten die krassen op het oppervlak van uw elektrische rolstoel kunnen veroorzaken.
- Reinig uw product indien nodig met een goedgekeurd desinfectiemiddel. Zorg ervoor dat het desinfectiemiddel veilig is voor gebruik op uw product voordat u het aanbrengt.

Apparatuur reinigen/desinfecteren:

Harde/zachte oppervlakken (kunststof bekleding, metalen frame, stoelbekleding, banden, armleuningen en voetplaatmatten, indien van toepassing).

- Bij harde/zachte ondergronden zichtbare vervuiling verwijderen indien aanwezig.
 - Gebruik voor kunststof en metaal Lysol®/Clorox® desinfectiespray/-doekjes en andere gekwalificeerde SARS-CoV-2-desinfectieproducte.
 - Voor andere vinyloppervlakken, reinig met vinylveilige desinfectiedoekjes of oplossingen
 - Voorgestelde desinfectiemiddelen
 - Birex® SE Desinfectiemiddel, Bleach-Rite® Desinfectiespray, Citrace® Germicide
 - Dispatch® Spray Ziekenhuisreiniger Desinfectiemiddel met bleekmiddel
 - Verdunde bleekmiddeloplossing (10% verdunning of minder); Let op: Bleekmiddel met een pH-factor tussen 7 en 9 is geschikt; een product met een pH van 10,5 of hoger kan de integriteit van het vinyloppervlak gedurende langere tijd beschadigen.
 - Desinfecterende doekjes
 - Clorox, Green Works, PDI Sani-Cloth HBdoekjes, Lysol, Oxivir, Virox en CaviWipes
 - Reinig voor het reinigen van banden met kant-enklare banden-/wielreinigers

Elektronica (joystick-controller, verbeterde displays, aanraakschermen, afstandsbedieningen, toetsenborden, mobiele telefoons en tablets, indien van toepassing)

- Bij elektronica zichtbare vervuiling verwijderen indien aanwezig.
 - Schakel het apparaat uit en koppel de batterijen los
 - Spuit nooit vloeistoffen rechtstreeks in het/de product(en).
 - Bevochtig een microvezeldoek met een mengsel van 70% isopropylalcohol / 30% wateroplossing. De doek moet vochtig zijn, maar niet druipend of te nat. Droog oppervlakken grondig om ophoping van vloeistoffen te voorkomen en voor het boksen..

⚠ WAARSCHUWING!

Volg alle veiligheidsinstructies voor het juiste gebruik van het ontsmettingsmiddel en/of reinigingsmiddel voor dat u dit aanbrengt op uw product. Het niet naleven hiervan kan leiden tot irritatie van de huid of tot voortijdige slijtage van de bekleding en de afwerkingen van de elektrische rolstoel.

Gebruik nooit reinigings- of desinfectiemiddelen, oplosmiddelen, smeermiddelen of enig ander product op de remblokken, remschijven, transaxle, motor/versnellingsbak van uw mobiliteitsproduct. Hierdoor kunnen de onderdelen beschadigd raken en/of niet goed functioneren. Materieel letsel en/of persoonlijk letsel kan het gevolg zijn.

Spuit uw elektrische rolstoel nooit af of plaats deze niet in direct contact met water. Uw elektrische rolstoel heeft een beschilderde ABS kunststof behuizing en afdekking, die gemakkelijk schoon te maken is met een vochtige doek.

Gebruik nooit chemicaliën om een vinyle zitting schoon te maken, deze kunnen veroorzaken dat de stoel glad wordt, uitdroogt en barst. Gebruik zeepwater en droog de zitting grondig.



Figuur 18. Reiniging en desinfectie

Wiel vervanging

Als u pneumatische banden heeft, en u heeft een lekke band, kunt u de binnenband vervangen. Als uw stoel uitgerust is met een massieve band invoeging, dan moet uw het complete wielsamenstelsel vervangen. Vervangende banden, binnenbanden en wielsamenstelsels zijn gemakkelijk beschikbaar via uw Quantum Rehab leverancier.

WAARSCHUWING!

De wielen aan uw elektrische rolstoel mogen alleen onderhouden of vervangen worden door een Quantum Rehab leverancier of een gekwalificeerde technicus.

Zorg dat de stroomtoevoer van de regelaar uitgeschakeld is en dat de rolstoel niet in uitrijmodus staat voordat u met deze procedure begint.


Om een band te verwisselen verwijdert u alleen de vijf slotbouten en verwijdert u daarna het wiel. Als verdere demontage nodig is, laat de band dan volledig leeglopen. Als u dit niet doet kan de band knappen.

Volg deze eenvoudige stappen om zowel pneumatische als massieve banden snel en veilig te repareren:


1. Schakel het vermogen naar de regelaar uit.
2. Zet de elektrische rolstoel op blokken.
3. Als u een pneumatische band verwisselt, laat de band dan volledig leeglopen voordat u het wiel verwijdert.
4. Verwijder de vijf (5) slotbouten van de wielnaaf. **Zie figuur 19.**
5. Haal het wiel van de naaf af.
6. Verwijder de schroeven en maak de voorste en de achterste helft van de velg los van elkaar. **Zie figuur 20.**
7. Verwijder de oude binnenband en vervang deze door een nieuwe, of vervang het geheel in het geval van een massieve band.
8. Schroef de twee velghelften aan elkaar.
9. Plaats het wiel weer op de naaf.
10. Plaats de vijf (5) slotbouten weer op de wielnaaf en draai ze vast.
11. Pomp de pneumatische band op tot aan de psi/bar/kPa luchtdrukbeïng die op elke band aangegeven staat.
12. Haal de elektrische rolstoel van de blokken af.



Figuur 19. Drive-wiel

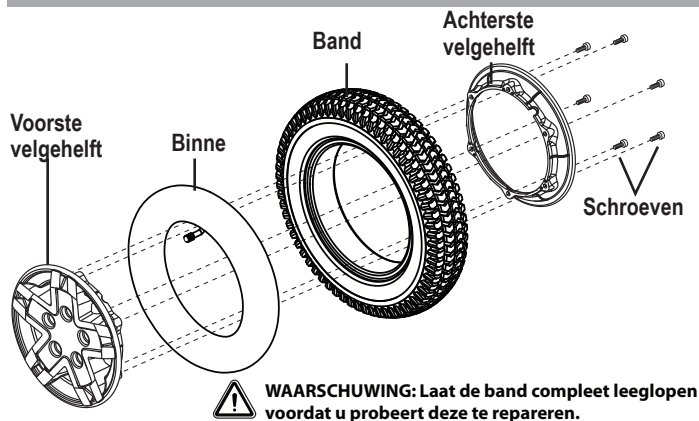

Figuur 20. Onderdelen drive-wiel

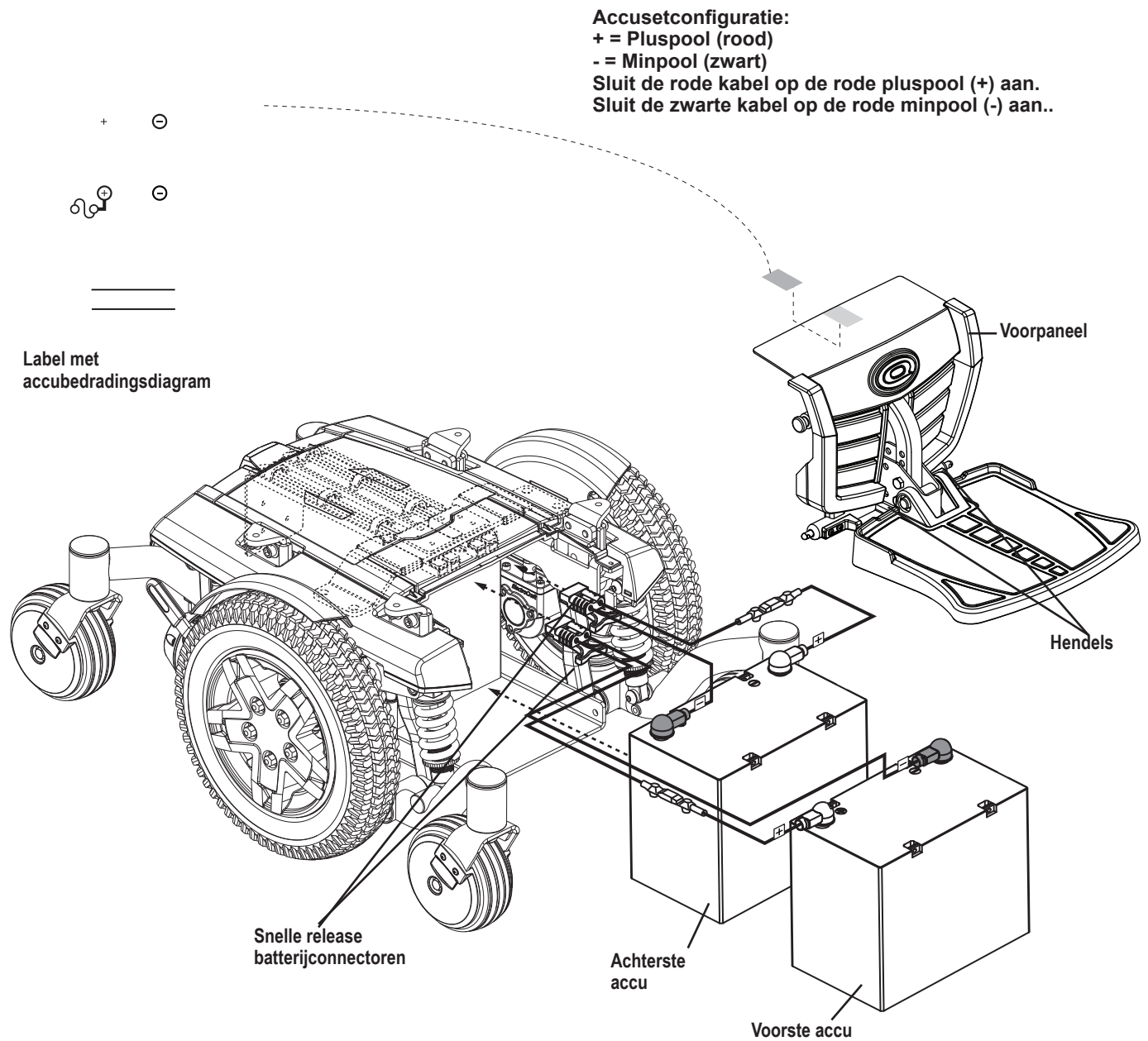

Figuur 21. Installatie accu's

Accu vervanger

Op een label op het voorpaneel staat een accubedradingsdiagramaangegeven. Zie de specificatietabel voor de juiste accuspecificaties.

**VERPLICHT!**

Batterij berichten, terminals, en aanverwante accessoires bevatten lood en lead verbindingen. Draag handschoenen en bril bij het verwerken van batterijen en handen wassen na het hanteren.

**WAARSCHUWING!**

De accu's in uw elektrische rolstoel dienen alleen behandeld of vervangen te worden door een bevoegde Quantum Rehab-leverancier of een bekwame monteur.

De accu's niet vervangen terwijl er iemand op de zitting zit.

Accu's voor de elektrische rolstoel zijn zwaar. Zie de specificatietabel. Als u niet in staat bent om zoveel gewicht te tillen, vraag dan om hulp. Let op uw houding en til niet meer gewicht dan u aan kunt.

Gebruik geen oude en nieuwe accu's door elkaar. Vervang altijd beide accu's tegelijk.

**VERBODEN!**

Houd gereedschap en andere metalen voorwerpen bij de polen van de accu vandaan. Contact met gereedschap kan elektrische schokken tot gevolg hebben.

Om de accu's te vervangen:

1. Schakel het vermogen naar de regelaar uit.
2. Zorg ervoor dat de elektrische rolstoel in rijmodus staat. Zie "Uw elektrische rolstoel".
3. Verwijder het voorpaneel door de hendels in te drukken (zie **figuur 21**) en het voetsteunplatform omhoog te tillen.
4. Koppel de snelle release-accuaansluitingen los. Zie **figuur 21**.
5. Verwijder de accu's.
6. Koppel de accukabels los van elke accu.
7. Koppel de accukabels aan de nieuwe voorste accu volgens het accubedradingsdiagram. Zie **figuur 21**.

**WAARSCHUWING!**

Draai de bevestigingen stevig aan zodat de aansluitingen goed vast zitten.

8. Koppel de accukabels aan de nieuwe achterste accu volgens het accubedradingsdiagram. Zie **figuur 21**.
9. Installeer de nieuwe accu's en sluit de snelle releaseaccuaansluitingen aan.
10. Herinstalleer het voorpaneel en voetsteunplatform.
11. Laad de accu's op. Zie "Batterijen en Opladen."

Wanneer u uw Quantum Rehab-leverancier bezoekt voor onderhoud

De volgende symptomen kunnen tekenen zijn van een ernstig probleem met uw elektrische rolstoel. Neem indien nodig contact op met uw Quantum Rehab-leverancier. Zorg als u opbelt dat u het modelnummer, het serienummer, de aard van het probleem en, indien beschikbaar, de errorcode paraat heeft.

- Lawaai vanuit de motor
- Versleten kabelbundels
- Gebarsten of kapotte aansluitingen
- Ongelijkmatige slijtage van de banden
- Schokkerige beweging
- Afwijking naar één kant
- Gebogen of kapotte wielstellen
- Rolstoel start niet op
- Rolstoel start wel op maar beweegt niet
- Losse zitting of zittingsonderdelen

Correctief onderhoud

Als de accustatusmeter niet oplicht wanneer u het vermogen inschakelt:

- Controleer de kabelaansluitingen. Zorg dat ze goed vast zitten.
- Controleer de stroomonderbreker. Reset deze als dat nodig is.
- Controleer de accuverbindingen.

**USA**

401 York Avenue
Duryea, PA 18642
www.quantumrehab.com

Canada

5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L3J 1V4
www.quantumrehab.ca

Australia

20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.quantumrehab.com.au

New Zealand

Unit 5/208 Swanson Road
Henderson, Auckland 0610
www.pridemobility.co.nz

UK

(Authorised UK Representative)
32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.quantumrehab.co.uk

The Netherlands

(Authorised EU Representative)
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen
www.quantumrehab.eu
www.quantumrehab.nl

Switzerland

(Authorised CH Representative)
SODIMED SA
Chemin Praz Devant 12
1032 Romanel-sur-Lausanne

Italy

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.quantumrehab-italia.it

France

26 Rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
www.quantumrehab.fr

Spain

Calle Las Minas Número 67
Polígono Industrial Urtinsa II, de Alcorcón
28923 Madrid
www.quantumrehab.es

Germany

Josef-Förster-Straße 6-8
33161 Hövelhof
www.quantumrehab.de

China

Room 508, Building #4
TianNa Business Zone
No. 500 Jianyun Road
Pudong New Area
Shanghai 201318
www.pridechina.cn

Serial #



UDI Label (if applicable)